

# Fitonasal Pediatric spray 125 ml

Cena: 47,99 PLN



## Opis słownikowy

Producent / Marka	ABOCA POLSKA SP. Z O.O.
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny leczniczy

## Opis produktu

## Wyrób medyczny

### Aboca, Fitonasal Pediatric, spray z atomizerem, 125 ml

Udrażnia i chroni błonę śluzową

#### Wskazania:

- niedrożność i podrażnienia błony śluzowej nosa spowodowane grypą, przeziębieniem, ostrym i przewlekłym alergicznym nieżytem nosa oraz ostrym i przewlekłym zapaleniem zatok.
- można stosować jako leczenie wspomagające w przypadku kaszlu i bólu gardła, spowodowanych sphywaniem wydzieliny po tylnej ścianie gardła oraz zapalenia ucha środkowego wywoływanego niedrożnością nosa.
- idealny do częstego stosowania
- wskazany powyżej 6. miesiąca życia
- stosowanie produktu u niemowląt i dzieci wspomaga oddychanie i ułatwia nocny odpoczynek.

## Działanie:

- **działanie udrażniające**, dzięki zbilansowanemu działaniu osmotycznemu, które ułatwia przenikanie wody z zablokowanych tkanek, nie podrażniając i nie wysuszając błony śluzowej;
- **działanie ochronne** błony śluzowej dzięki tworzeniu warstwy mukoadhezyjnej oraz działaniu antyoksydacyjnemu.
- **dogłębnie oczyszcza jamę nosową, usuwając nadmiar śluzu** i znajdujące się w nim **czynniki patogenne, podrażniające i alergizujące** (wirusy, bakterie, dym, smog, pyłki, substancje podrażniające itp.). To działanie jest przydatne u niemowląt, które nie potrafią wydymuchać nosa, oraz u dzieci, które robią to w niewłaściwy sposób.

## Skład:

- **substancje czynne: TANNISAL**, standaryzowany kompleks molekularny, zawierający: frakcję taninową z oczaru wirginijskiego i halit (sól wydobywana ze złóż kopalni, nieprzetworzona chemicznie).
- **zawiera ponadto:** wodę, glicerynę roślinną, sok z cytryny, nahcolite (naturalny wodorowęglan sodu).

## Sposób użycia:

- stosować **Fitonasal Pediatric** co najmniej **2 razy dziennie**, rano i wieczorem, oraz w razie potrzeby.

Dla skutecznego działania udrażniającego i ochronnego na błonę śluzową należy stosować **Fitonasal Pediatric** w następujący sposób:

### Od 6. miesiąca do 1. roku życia:

- położyć dziecko na boku, umieścić końcówkę atomizera w górnym nozdrzu i rozpylić produkt.

### Powyżej 1. roku życia:

- umieścić końcówkę atomizera w nozdrzu i delikatnie nacisnąć, przytrzymując przez kilka sekund.
- oczyścić nos lub, jeśli to możliwe, wydymuchać i rozpylić do drugiego nozdrza
- po każdym użyciu wyczyścić atomizer za pomocą czystej, wilgotnej szmatki i dokładnie wysuszyć

## Przeciwwskazania:

- nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub alergii na jeden lub więcej składników.
- w przypadku nieustąpienia objawów należy skonsultować się z lekarzem.
- stosować wyłącznie do nosa.
- unikać kontaktu z oczami.
- w razie kontaktu przemyć oczy wodą.

## Przechowywanie:

- przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
- należy zwrócić uwagę na zachowanie odpowiednich warunków przechowywania wyrobu.
- chronić przed światłem.
- opakowanie pod ciśnieniem: w razie podgrzania może eksplodować.
- nie przekłuwać ani nie palić, nawet po zużyciu.
- przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskiei, otwartych płomieni i innych źródeł zapłonu.
- nie palić.
- chronić przed promieniami słonecznymi.
- **nie narażać na temperatury wyższe niż 50°C/122°F**

## Ważne:

- **To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.**
- Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE 0477
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę w języku polskim
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.
- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników.
- Nie stosować wyrobu po upływie daty ważności.
- Okres ważności dotyczy produktu w nienaruszonym stanie i właściwie przechowywanego
- Okres ważności podany na opakowaniu nie zmienia się również po pierwszym rozpyleniu produktu
- Atomizer o stałym przepływie, który można stosować w każdej pozycji. Ma wygodną końcówkę, idealną również do nosków najmniejszych pacjentów
- **gluten free**
- **600mOsm/kg**

Objętość netto: 125 ml

## Producent:

Aboca S.p.A. Italia

## Dystrybutor:

Aboca Polska ul. Oswobodzenia 1 40-403 Katowice