

Fridababy, NoseFrida, aspirator do nosa 1 sztuka



Cena: 27,78 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Profimed
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny

Frida Baby Nose Frida Aspirator do nosa - 1 sztuka

0+ MIESIĘCY

Opis produktu:

Aspirator NoseFrida jest oryginalnym szwedzkim wyrobem medycznym, skonstruowanym przez lekarzy laryngologów i pediatrów

Zawartość:

- 1 NoseFrida
- 4 filtry higieniczne
- 1 etui

Wskazania:

- Dla dzieci poniżej 3. roku życia do bezpiecznego usuwania wydzieliny i śluzu z nosa w przeziębieniach, zapaleniu zatok i schorzeniach, którym towarzyszy powstawanie wydzieliny

Działanie:

- proste w użyciu urządzenie skutecznie oczyszcza nos dziecka z zanieczyszczeń, umożliwiając mu tym swobodne oddychanie, jedzenie oraz spokojny sen
- końcówka przykładana do nosa dziecka ma specjalny kształt, który chroni przed uszkodzeniem błony śluzowej nosa, nawet gdy dziecko wykona nieprzewidziany gwałtowny ruch
- przezroczysty zbiornik aspiratora pozwala na kontrolowanie wydzieliny pod względem ilości, gęstości i koloru
- natomiast dołączone filtry zabezpieczają przed dalszym jej przemieszczaniem. Zapobiegają one również możliwości zarażenia się od dziecka, co zostało potwierdzone klinicznie

Sposób użycia:

- ułożyć dziecko w bezpiecznej pozycji leżącej twarzą do góry
- przed użyciem aspiratora NoseFrida wprowadzić roztwór soli fizjologicznej do każdego otworu nosowego, co pomoże w rozrzedzeniu gęstej wydzieliny
- tubę poruszać okrężnymi ruchami w otworze nosowym
- wciągnąć delikatnie powietrze przez ustnik
- powoli i stopniowo zwiększać siłę ssącą, dopóki wydzielina nosowa nie zacznie gromadzić się w zbiorniku
- filtr należy wymieniać po każdorazowym użyciu

Jak czyścić:

- usunąć filtr
- umyć tubę mydłem z wodą
- wężyk osuszyć lub wyczyścić używając kilku kropli alkoholu izopropylowego
- umieścić filtr w otworze zatyczki i założyć na tubę - do usłyszenia kliknięcia"

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- rurki nie wkłada się do środka nosa, aby dziecka nie zranić w przypadku gdy się poruszy
- NoseFrida używać wyłącznie do oczyszczania nosa nie używać do uszu lub gardła
- nie dmuchać do czerwonego ustnika gdy rurka jest umieszczona w nosie dziecka
- Nosefrida nie jest zabawką trzymać wszystkie części z dala od dzieci
- nie używać, jeśli wstępują jakieś rany, objawy zapalenia lub krwawienie w nosie

- nie wkładać końcówki aspiratora zbyt daleko
- nie sterylizować wrzącą wodą, parą wodną lub w kuchence mikrofalowej
- nie podłączać do żadnych urządzeń ssących

Ważne:

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera instrukcję obsługi w **języku polskim**.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w **języku polskim**.
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.

Producent:

Frida Baby, LLC. 82 NE 26th St. Miami, FL 33137 USA

Dystrybutor:

Profimed, Sp. Z o.o. Al. Korfantego 125A 40-156 Katowice