

# Granuflex bordered, opatrunek hydrokoloidowy, 10x10cm 1 sztuka

Cena: 8,86 PLN



## Opis słownikowy

Producent / Marka	Convatec
Substancja czynna	Emplastrí hydrocolloidosa
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

## Opis produktu

## Wyrób medyczny

### Granuflex bordered, opatrunek hydrokoloidowy - 1 sztuka

Rozmiar: 10x10cm

#### Opis produktu:

**Granuflex Bordered** opatrunek hydrokoloidowy na rany przewlekłe (owrzodzenia podudzi na tle niewydolności żylniej i tętniczej, odleżyny, owrzodzenia cukrzycowe) i rany świeże, w okolicach narażonych na łatwe odklejenie się opatrunku

Produkt dostępny jest z refundacją z przepisu lekarza (przy określonych wskazaniach), lub bez recepty za pełną odpłatnością

#### Właściwości:

- opatrunek pod działaniem wydzielin z rany tworzy wilgotne środowisko sprzyjające procesom gojenia, wchłania wysięk oraz wspomaga autolizę tkanek martwiczych

## Zastosowanie:

- do leczenia ran mało i średnio sączących
- trudno gojące się - owrzodzenia skóry (także w pełną penetracją tkanek skóry)
- odleżyny (I-IV stopnia)
- owrzodzenia podudzi
- rany ostre - powierzchowne (niewielkie otarcia)
- oparzenia (II stopnia)
- miejsca pobrania przeszczepów skóry
- może być stosowany we wszystkich etapach leczenia, również w ranach z martwicą suchą lub rozplywną

## Sposób użycia:

- usuń zewnętrzną papierową część opatrunku, unikając kontaktu palców z lepną stroną opatrunku
- przyłóż przylepłą stronę opatrunku na środek rany
- usuń dolną papierową część opatrunku, przytrzymując opatrunek na ranie, ale go nie rozciągając, delikatnie wygładź opatrunek na ranie

Opatrunek może pozostawać na ranie do 7 dni w ranach zakażonych do 3 dni

## Ważne:

- Posiada oznakowanie CE 2797
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera instrukcję obsługi w **języku polskim**.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w **języku polskim**.