

Helisto care, Woreczek na mocz jednorazowego użytku sterylny, dla dziewczynki, 100 ml



Cena: 1,50 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	HELBO SP. Z O.O.
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny

Helisto care, Woreczek na mocz jednorazowego użytku sterylny, dla dziewczynki, 100 ml

Właściwości:

- Woreczek do pobierania moczu u dziewczynek
- Woreczek do pobierania moczu u noworodków i dzieci to produktu uniwersalny, sterylny, przeznaczony do jednorazowego użytku
- Pozwala na pobranie próbki moczu do badania w prosty sposób i niezawodny
- Woreczek wykonany jest z najwyższej jakości antyalergicznym materiałów, które gwarantują bezpieczny kontakt ze skórą dziecka
- Nie zawiera lateksu
- Pojemność 100 ml
- Woreczek posiada łatwą do odczytu skalę pomiaru diurezy (10ml)
- Samoprzylepna część worka została pokryta antyalergicznym klejem .

Sposób użycia:

- Umyj ręce
- Dokładnie umyj i osusz narządy płciowe i pupę dziecka
- Otwórz opakowanie z woreczkiem
- Starannie przyklej woreczek wokół narządów płciowych dziecka tak aby dokładnie przylegał do skóry, nie odstawał i nie przeciekał
- Po napełnieniu woreczka moczem woreczek odklej od skóry i szczelnie zamknij.

Warunki przechowywania:

- Przechowywać w czystym i suchym miejscu z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych oraz dużej wilgotności
- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla małych dzieci

Środki ostrożności:

- Wyrób zachowuje sterylność do momentu otwarcia opakowania
- Nie używać jeśli opakowanie zostało otwarte lub nienaruszone
- W przypadku uszkodzenia lub niezamierzonego otwarcia wyrób należy wyrzucić do kosza
- Nie przechowywać w pobliżu substancji trujących szkodliwych lub żrących
- Nie używać po upływie daty ważności wyrobu
- Pobraną próbkę należy traktować jako potencjalnie niebezpieczną
- Zużyty woreczek należy wyrzucić do kosza z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności
- Worka wypełnionego moczem nie należy naciskać, zginać, przekłuwać, ani nie wolno na nim siadać czy leżeć
- Brak zachowania odpowiedniej higieny może doprowadzić do problemów ze zdrowiem
- Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą
- Każdy poważny incydent medyczny związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mieszka

Ważne:

- **To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.**
- Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE 0197
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim

- Zawiera etykietę w języku polskim
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.

Objętość netto: 100ml

Wytwórca:

Hualan Xiangde medical products Co., Ltd., No. 11 Weiwu Road, Huaiyin District, Huaiian, Jiangsu, 223300, China

Dystrybutor:

Medicinae Sp. z o.o., ul. Ząbczyńska 3, 91-342 Łódź