

## Helisto, plastry na odciski z kwasem salicylowym 20x70mm, 8 sztuk



Cena: 7,60 PLN

### Opis słownikowy

Producent / Marka	NTRADE SP. Z O.O.
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

### Opis produktu

## Wyrób medyczny

## Helisto, plastry na odciski z kwasem salicylowym 20x70mm, 8 sztuk

### Właściwości:

- Plastry na odciski z kwasem salicylowym działają wygładzająco i ochronnie.
- Zmiękczając skórę, plastry gwarantują szybkie i bezbolesne usunięcie odcisków.
- Centralnie umieszczona pianka PE (polietylenowa) zabezpiecza docelowe miejsce przed ocieraniem i uciskiem.
- Nie zawiera PVC
- Z kwasem salicylowym
- Klej termotopliwy z siatką UV-C
- Opracowany według najnowocześniejszej technologii:

- Nie zawiera rozpuszczalników
- Hipoalergiczny
- Optymalna wydajność w każdych warunkach środowiskowych
- Pakowany pojedynczo
- Tylko do użytku miejscowego

## Sposób użycia:

- Przed aplikacją upewnij się, że skóra gdzie ma zostać umieszczony plaster jest czysta i sucha, aby zapewnić maksymalną czepliwość i skuteczność działania.
- Wyciągnij plaster z opakowania, usuń część ochronną i umieść plaster w miejscu odcisku.
- Stosuj jeden plaster dziennie.

## Ostrzeżenia:

- Stosować tylko w leczeniu odcisków, tylko do użytku zewnętrznego.
- Nie stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę.
- Nie stosować na zaczerwienioną, zmienioną zapalnie lub popękaną/spierzchniętą skórę.
- W przypadku wystąpienia uczulenia lub podrażnienia, natychmiast przerwać leczenie.
- Przed użyciem tego produktu skonsultuj się z lekarzem, jeżeli masz cukrzycę i/lub problemy z układem krążenia, jesteś w ciąży lub karmisz piersią, lub masz mniej niż 16 lat.
- Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w czystym, suchym i chłodnym miejscu.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zawiera 35-40% kwasu salicylowego.
- Nie stosować dłużej niż 2 tygodnie, chyba że po konsultacji z lekarzem.
- W przypadku wystąpienia poważnego incydentu należy powiadomić producenta lub właściwy organ.

## Ważne:

- **To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.**
- Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE 0051
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę w języku polskim

- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.

Zawartość: 8 sztuk

## **Producent:**

Wyprodukowano dla Medicinæ Sp. z o.o., ul. Ząbczyńska 3, 91-342 Łódź

## **Dystrybutor:**

NTRADE Sp. z o.o., ul. Kolejowa 5A, 58-124 Marcinowice