

Help4skin, gojenie ran, żel hydrokoloidowy, 20 g



Cena: 18,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Hekp4skin
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Wyrób medyczny

Help4skin gojenie ran żel hydrokoloidowy - 20g

Wskazania:

Do stosowania w suchych i wilgotnych ranach, takich jak:

- Rany
- Skaleczenia
- Zadrapania
- Otarcia i pęknięcia skóry
- Powierzchnowe oparzenia
- Poręczna tuba zapewnia odpowiednią ilość produktu na codzienne zranienia.

Działanie:

- Zawiera **kwasowy karbomer stabilizowany karnozyną**, podstawowym peptydem występującym naturalnie w skórze.
- W przypadku ran suchych takich jak otarcia i rany chirurgiczne **ma działanie okluzyjne**: hamuje parowanie i zmniejsza utratę płynu przez naskórek.
- **Karnozyna** - buforuje kwaśne polimery, dzięki czemu działa jako przeciwutleniacz.
- **Karbomer** - pochłania nadmiar płynu z wilgotnych, sączących się ran oraz schładza i zmiękcza miejsce kontaktu z plastrem i/lub bandażem. **Nie przywiera do rany.**

Stosowanie:

Zamknięte rany:

1. Oczyszczyć i zdezynfekować leczony obszar.
2. Nałożyć preparat na ranę, nie dotykając jej końcówką aplikatora.
3. W razie potrzeby założyć bandaż lub plaster.

Otwarte rany:

1. Oczyszczyć i zdezynfekować ranę.
2. Dokładnie i delikatnie osuszyć sterylną gazą.
3. Nałożyć grubą warstwę preparatu (0.5-0.75 cm) na ranę, nie dotykając jej końcówką aplikatora.
4. Założyć plaster lub bandaż.
5. Zmieniać żel i plaster lub bandaż przynajmniej raz dziennie.
6. Zmniejszyć ilość stosowanego preparatu, gdy na ranie pojawi się strup.

Ważne:

- Wyrób medyczny - **posiada certyfikat CE 1639**
- **Posiada deklarację zgodności UE.**
- Zawiera instrukcję obsługi w **języku polskim.**
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w **języku polskim.**