

# Help4skin gojenie ran żel hydrokoloidowy, spray, 75 g



Cena: 34,80 PLN

## Opis słownikowy

Producent / Marka	Polpharma
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny leczniczy

## Opis produktu

## Wyrób medyczny

### Help4Skin Gojenie Ran żel hydrokoloidowy w sprayu, przyspieszający gojenie ran - 75 g

Help4Skin Gojenie Ran - żel hydrokoloidowy to wyrób medyczny, który w sposób pośredni **przyspiesza gojenie ran** poprzez regulację ich środowiska. Dodatkowo **chłodzi i koi oparzone miejsce**, dzięki wybranym substancjom pomocniczym podtrzymującym aktywność hydrożelu. **Bez parabenów.**

## Właściwości:

- Pośrednio przyspiesza gojenie ran.
- Pomaga uniknąć infekcji.
- Natychmiast zmniejsza ból
- Zmniejsza ryzyko powstawania blizn
- Reguluje prawidłowy poziom wilgotności rany.

## Skład:

- kwaśny koloidalny karbomer, karnozyna, woda, benzoesan sodu, sorbinian potasu.

## Wskazania:

1. Do miejscowej **pielęgnacji suchych i wilgotnych ran**.
2. Do stosowania **w ostrych i przewlekłych ranach** takich jak:

- Rany (w tym chirurgiczne)
- Odleżyny
- Otwarte owrzodzenia nóg
- Otarcia
- Powierzchnowe oparzenia.

**Help4Skin Gojenie ran** może być stosowany na powierzchniowe oparzenia naskórka i/lub skóry właściwej, zwykle charakteryzujące się obrzękiem, zaczerwienioną skórą i pęcherzami.

**Help4Skin Gojenie ran** może być również stosowany w przypadku ran i owrzodzeń stóp powstałych w wyniku stanów cukrzycowych. Diabetycy z problemami stóp powinni skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania produktu.

## Sposób działania:

- Zawiera  **kwasowy karbomer stabilizowany karnozyną**, podstawowym peptydem występującym naturalnie w skórze. **W przypadku ran suchych** takich jak otarcia i rany chirurgiczne **ma działanie okluzyjne: hamuje parowanie i zmniejsza utratę płynu przez naskórek**. Karnozyna buforuje kwaśne polimery, dzięki czemu działa jako przeciwutleniacz. Karbomer pochłania nadmiar płynu z wilgotnych, sączących się ran oraz schładza i zmiękcza miejsce kontaktu z plastrem i/lub bandażem.
- Nie przywiera do rany.

## Sposób użycia wyrobu medycznego:

Dokładnie umyć ręce przed i po użyciu preparatu na ranę.

Zamknięte rany:

- oczyścić i zdezynfekować leczony obszar,
- nałożyć preparat na ranę, nie dotykając rany końcówką aplikatora,
- w razie potrzeby założyć bandaż lub plaster.

Otwarte rany:

- oczyścić i zdezynfekować ranę,
- dokładnie i delikatnie osuszyć sterylną gazą,
- nałożyć grubą warstwę preparatu (0.5-0.75 cm) na ranę, nie dotykając rany końcówką aplikatora,
- założyć plaster lub bandaż,
- zmieniać żel i plaster lub bandaż przynajmniej raz dziennie,
- zmniejszyć ilość stosowanego preparatu, gdy na ranie pojawi się strup.

**Uwaga!** W przypadku oparzeń - należy najpierw przemyć wodą, następnie przejść do następujących punktów.

**Help4Skin Gojenie ran** nie jest pierwszym środkiem w przypadku oparzeń!

Natychmiast po wystąpieniu oparzenia należy schładzać jego miejsce pod letnią bieżącą wodą przez 20 minut.

Należy to zrobić jak najszybciej, gdyż korzystny efekt schładzania oparzonego miejsca zmniejsza się z upływem czasu, a po 30 minutach całkowicie zanika. Aby zapobiec hipotermii, szczególnie w przypadku oparzenia dużej powierzchni ciała, nie zaleca się stosowania zimnej wody. **Help4Skin Gojenie ran** należy zastosować dopiero w następnej kolejności, po odpowiedniej ocenie stopnia oparzenia.

## Przeciwwskazania i środki ostrożności:

- Nie używać w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na którykolwiek ze składników.
- Nie stosować **Help4Skin Gojenie ran** na twarz, oczy, powieki oraz błony śluzowe.
- Nie stosować preparatu po upływie terminu ważności (podanego na opakowaniu).
- Należy zawsze zasięgnąć porady lekarza:
  - w przypadku dużych, obszernych lub bardzo głębokich ran,
  - w przypadku silnie zakażonych ran,
  - w przypadku wolnego gojenia się rany lub ryzyka powikłań.
- Trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

## Ważne:

- Pojemnik pod ciśnieniem. Podgrzewany może wybuchnąć. Trzymać z dala od ciepła/iskier/otwartego ognia/gorących powierzchni.
- Nie palić.
- Nie przekłuwać lub palić, nawet po zużyciu.
- Nie rozpylać na otwarty ogień lub żarzący się materiał.
- Chronić przed światłem słonecznym i nie wystawiać na działanie temperatur przekraczających 50°C.
- Chronić od wilgoci.
- Do użytku zewnętrznego
- Przechowywać w temperaturze między 5°C a 25°C.

Dystrybutor: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A., ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.

## Ważne:

- Wyrób medyczny - posiada certyfikat CE 1 639
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w języku polskim.