

Help4Skin kurzajki i brodawki krioterapia 50ml



Cena: 52,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Wyrób medyczny

Help4skin Brodawki i Kurzajki Aerozol, 50 ml

Wskazania:

Wyrób medyczny Help4Skin przeznaczony jest do usuwania brodawek i kurzajek metodą krioterapii, dla dorosłych i dzieci powyżej 4. roku życia.

Właściwości:

- Prosty, aktywny, i skuteczny sposób usuwania większości brodawek i kurzajek dzięki ich całkowitemu wymrożeniu już po 1 aplikacji.
- Preparat do usuwania brodawek i kurzajek metodą krioterapii z użyciem systemu VERRUKILL®. Polega na całkowitym wymrożeniu zmian do korzenia, w bardzo krótkim czasie.
- Zazwyczaj jednorazowy zabieg wystarcza aby pozbyć się problemu. W przypadkach szczególnie opornych brodawek lub kurzajek konieczne będzie powtórzenie zabiegu po upływie dwóch tygodni.
- Opakowanie wystarcza na przeprowadzenie 12 zabiegów.

- Jednorazowe aplikatory eliminują ryzyko przenoszenia wirusów.

Skład:

Dimetyloeter i płynny propan.

Zawartość opakowania:

- Gotowy do użytku pojemnik z aerozolem 50 ml (dimetyloeter i płynny propan) - 1 szt.
- Bezpieczna zatyczka aktywująca system dozujący - 1 szt.
- Jednorazowe aplikatory piankowych - 12 szt.
- Ulotka informacyjna - 1 szt.

Działanie:

- Krioterapia przeprowadzona metodą VERRUKILL® to bezpieczny, skuteczny i praktyczny sposób usunięcia brodawek i kurczajek w warunkach domowych. Polega na całkowitym wymrożeniu zmian do korzenia, w bardzo krótkim czasie. Po zabiegu przy korzeniu brodawki pojawi się mały, niewidoczny pęcherzyk, który ułatwi jej odpadnięcie. Zamrożona kurczajka stopniowo zanika lub odpada po około 10-14 dniach. W jej miejscu pojawia się nowy, zdrowy naskórek.
- Zazwyczaj jednorazowy zabieg wystarcza aby pozbyć się problemu. W przypadkach szczególnie opornych brodawek lub kurczajek konieczne będzie powtórzenie zabiegu po upływie dwóch tygodni. Kurczajki są zwykle bardziej odporne na leczenie. Konieczne może być powtórzenie zabiegu 3-4 razy w odstępach dwutygodniowych.

Sposób użycia wyrobu medycznego:

- Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się ze wskazaniami opisanymi w ulotce informacyjnej.
- Załóż końcówkę piankową na aplikator w górnej części pojemnika. Piankę należy wprowadzić w taki sposób, aby połowa znajdowała się wewnątrz dyszy aplikatora, a połowa na zewnątrz.
- Przytrzymaj puszkę pionowo i załóż bezpieczną zatyczkę na dozownik.
- Aby aktywować urządzenie, puszkę należy odwrócić do góry dnem, opierając zatyczkę uruchamiającą na stole. Jedną ręką mocno przytrzymaj zatyczkę uruchamiającą, a drugą naciskaj ją przez 1 sekundę. Po naciśnięciu dyszy słyszalne będzie syczenie: pianka zostaje nasączona zimnym płynem i urządzenie jest gotowe do usunięcia brodawki lub kurczajki. Jeśli nacisk będzie stosowany zbyt długo, może dojść do nagromadzenia płynu na dnie zatyczki. Jest to zjawisko normalne, a płyn szybko wyparuje.
- Jedną ręką przytrzymaj zatyczkę uruchamiającą na stole, a drugą usuń pojemnik. Zwróć uwagę, aby nie odwrócić zatyczki.
- Trzymając pojemnik w dłoni, delikatnie dotknij końcówką pianki do środkowej części brodawki lub kurczajki. **Należy wywierać delikatny, ale stały nacisk, upewniając się, że pianka styka się brodawką lub kurczajką przez cały czas trwania zabiegu.**
- Po zabiegu należy poczekać trzy minuty, a następnie zdjąć aplikator za pomocą papierowej chusteczki. Aby uniknąć zarażenia skóry wirusem, nigdy nie wolno dotykać końcówki pianki gołymi dłońmi. Piankę należy wyrzucić po każdym zabiegu.
- Po użyciu, należy upewnić się, że pionowa strzałka na zatyczce z oznaczeniem OFF jest wyrównana z trójkątnym wskaźnikiem na plastikowej podstawie dozownika pojemnika, a następnie delikatnie wcisnąć zatyczkę w celu zamknięcia.

- W przypadku zabiegów w obrębie brodawek i dłoni znajdujących się na wewnętrznych powierzchniach dłoni lub stóp należy delikatnie odsunąć palce.
- W przypadku wielu brodawek umiejscowionych blisko siebie w danym momencie zabieg należy wykonywać w obrębie jednej brodawki.
- Zabiegi w obrębie pozostałych brodawek należy wykonywać osobno w odstępach dwutygodniowych.
- Dla każdej brodawki należy użyć osobnego jednorazowego aplikatora.
- Aplikatorów nigdy nie wolno używać ponownie. W przypadku jednej brodawki nigdy nie nakładać wyrobu więcej niż 4 razy.

W przypadku brodawek podeszwowych należy moczyć stopę w gorącej wodzie przez co najmniej 6 minut, a następnie usunąć zrogowaciałą warstwę brodawki za pomocą pumeksu, aby zoptymalizować efekty zabiegu z wykorzystaniem wyrobu **Help4Skin brodawki i kurzajki**.

Przeciwwskazania i środki ostrożności:

- Należy prawidłowo przestrzegać wszystkich wskazań.
- Wyłącznie do użytku zewnętrznego
- Nie stosować w okresie ciąży lub karmienia piersią.
- Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 4 lat.
- Nie stosować na podrażnionej lub zakażonej skórze, na skórze z ciemnymi przebarwieniami, znamionami barwnikowymi, znamionami wrodzonymi lub nietypowymi, owłosionymi naroślami podobnymi do brodawek lub kurzajek. W razie wątpliwości przed wykonaniem zabiegu należy poradzić się lekarza.
- Nie stosować wyrobu w szczególnie wrażliwych obszarach skóry (twarz, podbródek, pachy, sutki, odbyt, narządy rozrodcze, usta, nos, wargi, uszy i okolice oczu).
- Nie stosować w skojarzeniu z innymi preparatami przeznaczonymi do usuwania brodawek.
- Produkt nie jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z cukrzycą lub zaburzeniami krążenia. W razie zaburzeń krążenia przed wykonaniem zabiegu należy poradzić się lekarza.
- Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie może spowodować wybuch.
- Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskiei, otwartego ognia lub innych źródeł zapłonu.
- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Chronić przed światłem słonecznym.
- Nie palić.
- Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50oC.
- Nie przekłuwać i nie spalać nawet po użyciu.
- Przed wyrzuceniem sprawdzić czy pojemnik jest pusty

Możliwe działania niepożądane wyrobu medycznego:

- W przypadku zabiegów wymrażania może dojść do przemijającego odbarwienia skóry, która stopniowo wróci do normy.
- Nieprawidłowe użytkowanie produktu może doprowadzić do zbyt głębokiego zamrożenia, prowadzącego do powstania blizn i uszkodzenia znajdujących się poniżej nerwów. Nadmierne zamrożenie może doprowadzić do uszkodzenia tkanki wokół brodawki.
- Nie przytrzymywać aplikatora na brodawce zwykłej dłużej niż przez 20 sekund. W przypadku kurczaków (z wyjątkiem występujących na palcach i sklepieniu stopy) nie przytrzymywać aplikatora na skórze dłużej niż przez 40 sekund.

Ważne:

- **To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.**
- Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE 0546
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę w języku polskim
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.

Producent:

Sixtem Life S.r.l., Via E. Boni, 19

Dystrybutor:

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA, 83-200 Starogard Gdański ul. Pelplińska 19

Producent: Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

Adres: ul. Pelplińska 19 83-200 Starogard Gdański

Telefon: +48 58 563 16 00