

## Heviran Comfort, Plastry na opryszczkę, 15 sztuk



Cena: 30,90 PLN

### Opis słownikowy

Producent / Marka	Polpharma
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny leczniczy

### Opis produktu

## Wyrób medyczny

### Heviran Comfort plastry na opryszczkę - 15 przezroczystych plastrów

#### Opis:

- Heviran Comfort plastry na opryszczkę zmniejszają widoczność oraz łagodzą dolegliwości związane z opryszczką.
- Wyrób medyczny jest w postaci miękkiego krążka poliuretanowego nasączonego hipoalergiczną substancją, w której rozpuszczono kwas hialuronowy (0,5%).
- Plastry zawierają kwas hialuronowy, który dzięki odpowiedniemu nawilżeniu skóry, łagodzi uczucie swędzenia i mrowienia oraz chroni przed powstaniem blizn.

Heviran Comfort plastry na opryszczkę działają jak ochronna tarcza:

- Zmniejszają ryzyko infekcji tworząc barierę ochronną przed czynnikami zewnętrznymi.

- Chronią przed przeniesieniem wirusa na inne miejsca na skórze lub zakażeniem innych osób.
- Wspomaga gojenie.
- Łagodzi swędzenie i mrowienie.

Plastry można stosować na każdym etapie rozwoju opryszczki, a najlepiej przy pierwszych objawach.

## Sposób użycia:

Plaster posiada wygodny aplikator (podłużny ogonek), który umożliwia higieniczne, bezdotykowe i sprawne nałożenie plastra na opryszczkę, co pozwala uniknąć zakażenia innych części ciała lub innych osób.

1. Otwórz saszetkę i wyjmij plaster trzymając tylko za podłużny ogonek.
1. Przyklej plater na opryszczkę i delikatnie odklej ogonek.
1. Usuń niebieską folię ochronną, dzięki temu na ustach pozostanie niewidoczny plaster.

## Środki ostrożności:

- Plaster może powodować reakcję alergiczną skóry.
- Należy zachować kartonik lub saszetkę/opakowanie bezpośrednio plastra w celu ewentualnej konsultacji z lekarzem.
- Nie wyrzucać do środowiska naturalnego.
- Nie stosować po upływie terminu ważności
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci

## Ważne:

- wyrób medyczny - posiada certyfikat CE 0051.
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w języku polskim.