


Home Check, domowy, szybki, Test Na niedobór żelaza, poziom ferrytyny, anemia, we krwi, 1 sztuka

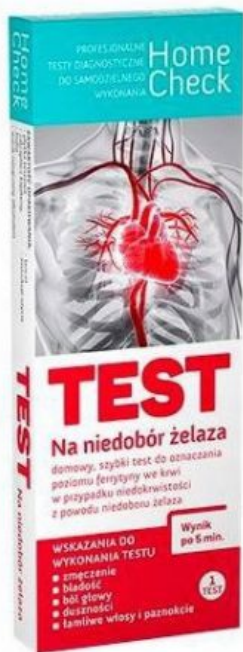

Cena: 21,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Milapharm
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Home Check Test Na niedobór żelaza, 1 sztuka

TEST DO SAMOKONTROLI

Domowy, szybki test do oznaczania poziomu ferrytyny we krwi w przypadku niedokrwistości z powodu niedoboru żelaza.

Opis:

Home Check Test Niedobór żelaza to wyrób medyczny w postaci domowego testu płytkowego, który przeznaczony jest do oznaczenia poziomu ferrytyny we krwi badanej osoby. Test jest prosty w obsłudze, a jego wynik można odczytać już po 5-ciu minutach.

Wskazania:

Test zaleca się wykonać w przypadku:

- podejrzenia anemii,
- jeśli u pacjenta występują: zmęczenie, bladłość, bóle głowy, duszności,
- łamliwe włosy i paznokcie.

- Szczególnie narażonymi na niedobór żelaza są sportowcy, kobiety ciężarne, kobiety obficie miesiączkujące, weganie, wegetarianie, osoby starsze oraz osoby z zaburzeniami wchłaniania.

Przeznaczenie produktu:

Test pomaga oznaczyć poziom ferrytyny w próbce krwi. Ferrytyna jest białkiem, które magazynuje żelazo we krwi człowieka. Jej niski poziom świadczy o niedokrwistości.

Zawartość opakowania:

Saszetka z testem kasetkowym oraz pipetą kapilarną, gazik do dezynfekcji, sterylny lancet (nakłuwacz) do uzyskania próbki krwi, pojemnik z zakraplaczem zawierającym 1 ml odczynnika, instrukcje użycia.

Stosowanie produktu:

- Należy umyć ręce mydłem i spłukać czystą ciepłą wodą.
- Przed otwarciem torebki należy doprowadzić ją do temperatury pokojowej. Następnie należy otworzyć woreczek foliowy i wyjąć kasetkę.
- Ostrożnie ściągnąć i wyrzucić wysuniętą nasadkę lancetu.
- Następnie należy użyć dołączonego wacika nasączonego alkoholem do odkażenia miejsca nakłucia opuszka palca środkowego lub serdecznego.
- Następnie nacisnąć lancet opuszką palca po stronie, z której została wyjęta nasadka. Po użyciu końcówka chowa się automatycznie i bezpiecznie.
- Trzymając dłoń w dół, masować koniec, który został nakłuty, aby uzyskać kroplę krwi.
- Nie ściskając kapilarnej bulwy kroplomierz, należy przyłożyć ją do kropli krwi. Krew migruje do zakraplacza kapilarnego przez kapilarę do linii wskazanej na zakraplaczu kapilarnym.
- Następnie pobraną krew umieścić w dołku na próbkę w kasecie, ściskając gruszkę zakraplacza.
- Począkać aż krew zostanie całkowicie rozlana w dołku. Okręcić nakrętkę butelki z roztworem buforowym i dodać 1 kroplę roztworu buforowego do dołka próbki na kasecie.
- Wyniki należy odczytać po 5 minutach.

Przeciwwskazania i środki ostrożności:

- Przed wykonaniem testu należy zapoznać się z informacją o produkcie, dołączoną do opakowania.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Uwagi:

- Wyniki pozytywne lub budzące niepokój należy skonsultować z lekarzem.
- W przypadku uzyskania wyniku negatywnego przy jednoczesnym występowaniu objawów ze strony układu pokarmowego należy skonsultować się z lekarzem.

Ważne:

- Informacje na opakowaniu oraz w instrukcji używania wyraźnie wskazują, że wyrób medyczny przeznaczony jest do samokontroli.
- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Wyrób medyczny - posiada certyfikat CE 0123
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w języku polskim.
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta

Producent:

- Milapharm sp. z o.o.