

Home Check szybki domowy Test na infekcje intymne 1 szt.



Cena: 11,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Milapharm
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny do samokontroli

Home Check, Test Na Infekcje Intymne, 1 sztuka

Szybki, domowy test do określenia pH pochwy.

Opis:

Home Check Test na infekcje intymne to wyrób medyczny w postaci domowego testu do określania pH w wymazie z pochwy. Jego użycie umożliwia diagnostykę infekcji w drogach płciowych kobiety. Test jest prosty w obsłudze i szybki. Jego wynik jest możliwy do odczytania właściwie natychmiast.

Wskazania:

- pieczenie i swędz okolic intymnych,
- pieczenie podczas oddawania moczu
- antybiotykoterapia.

Przeznaczenie produktu:

Wyrób medyczny, Home Check Test na infekcje intymne pozwala wykryć nieprawidłową kwasowość wydzieliny z pochwy, a tym samym zdiagnozować bakteryjne zapalenie pochwy (waginozę bakteryjną).

Działanie:

- Zasada działania wyrobu medycznego związana jest ze wskaźnikiem pH, który jest używany do określania tej wartości w próbce wymazu z pochwy. W trakcie nanoszenia próbki i zetknięcia się wymazówki z papierkiem wskaźnikowym pH, umieszczonym na panelu testowym, zachodzi zmiana w kolorze papierka. Każda wartość pH powoduje różne stopnie i odcienie koloru.

Zawartość opakowania:

Płytką testową, sterylną wymazówką, instrukcja użycia.

Stosowanie produktu:

1. Przed wykonaniem testu należy umyć dokładnie dłonie.
2. Otworzyć saszetkę z wymazówką.
3. Rozdzielić wargi sromowe i odsłonić ujście pochwy.
4. Włożyć delikatnie wymazówkę do pochwy, a następnie docisnąć wacik do punktu, gdy około 5 centymetrów wacika znajdzie się w pochwie przez około 10 sekund.
5. Wyciągnąć wymazówkę w celu wykonania testu.
6. Wyjąć kasetkę testową z saszetki. Należy pamiętać, że po jej otwarciu test można wykonać w przeciągu godziny.
7. Przyłożyć główkę wymazówki do obszaru pH kasetki testowej co najmniej 5 razy.
8. Odczytać wynik natychmiast, gdy strefa pomiarowa jest jeszcze wilgotna. Porównać kolor z obszaru pomiaru pH ze skalą kolorów na saszetce foliowej.

Przeciwwskazania i środki ostrożności:

- Przed przystąpieniem do testu należy zapoznać się z informacją zawartą w ulotce dołączonej do opakowania.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić od światła i wilgoci.
- Produkt jednorazowego użytku. Nie stosować ponownie.
- Nie stosować przed upływem 72 godzin od zastosowania preparatów dopochwowych.
- Nie stosować przed upływem 48 godzin od stosunku płciowego.
- Nie stosować przed upływem 5 dni od zakończenia miesiączki.

Ważne:

- Niektóre okoliczności (menstruacja, menopauza, stosunek płciowy, stosowane produkty dopochwowe) mogą tymczasowo zmienić poziom pH pochwy a co za tym idzie - prowadzić do uzyskania fałszywych wyników.
- Nie zaleca się mycia ani brania prysznic przed wykonaniem testu.
- Nie należy rozpoczynać żadnego leczenia przed omówieniem wyniku z lekarzem.

Ważne:

- Informacje na opakowaniu oraz w instrukcji używania wyraźnie wskazują, że wyrób medyczny przeznaczony jest do samokontroli.
- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE 0123
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę w języku polskim
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.

Producent:

Hydrex Diagnostics Sp. z o.o., Aleja Stanów Zjednoczonych 61a, 04-028 Warszawa