


Home Check, Test FOB, test do wykrywania krwi utajonej, w kale, 1 test

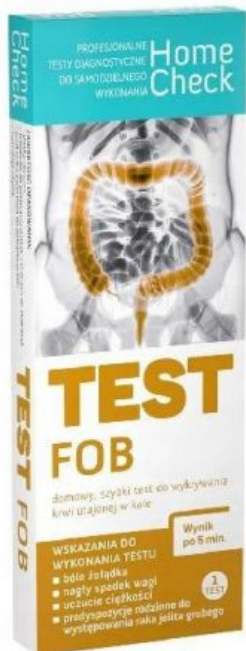

Cena: 17,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Milapharm
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny

Home Check Test FOB - 1 sztuka

TEST DO SAMOKONTROLI

Domowy, szybki test do wykrywania krwi utajonej w kale

Opis produktu:

Home Check Test FOB to wyrób medyczny w postaci domowego testu kasetkowego na krew utajoną w kale (FOB: ang. fecal occult blood). Jego użycie umożliwia diagnostykę różnych chorób przewodu pokarmowego. Test jest prosty w obsłudze i szybki. Jego wynik jest możliwy do odczytania już w przeciągu 5 minut.

Dokładność badania wynosi 99,1%.

Wskazania:

- Zaleca się wykonanie badania jeśli u pacjenta występują: bóle żołądka, uczucie ciężkości, nagły spadek masy ciała, a także jeśli

posiada predyspozycje rodzinne do występowania raka jelita grubego.

- Osobom po 50 roku życia zaleca raz do roku profilaktyczne wykonywanie testu jako przesiewowe badanie w kierunku nowotworów jelita grubego.

Działanie:

Działanie testu opiera się na zasadzie reakcji pomiędzy antygenem a przeciwciałem - na membranie testu umieszczone zostały specyficzne przeciwciała przeciwko antygenowi ludzkiej hemoglobiny. Dzięki temu wykrywane są nawet niewielkie ilości ludzkiej krwi, które nie są widoczne gołym okiem.

Przeznaczenie produktu:

Wyrób medyczny, Home Check Test FOB, pozwala wykryć krew utajoną w kale. Jej obecność może wskazywać na takie choroby jak: wrzody żołądka, hemoroidy, polipy jelita grubego, chorobę Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego czy nowotwór jelita grubego. Wczesna diagnostyka pozwala na szybkie wdrożenie odpowiedniego leczenia.

Zawartość opakowania:

Saszetka z testem kasetkowym, pojemnik z odczynnikami oraz aplikatorem do pobrania próbki, podkładka papierowa do pobrania próbki, instrukcja użycia.

Przeciwwskazania i środki ostrożności:

- Przed przystąpieniem do testu należy zapoznać się z informacją zawartą w ulotce dołączonej do opakowania.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić od światła i wilgoci.
- Produkt jednorazowego użytku. Nie stosować ponownie.

Uwagi:

- Odradza się, aby kał do badania był pobierany podczas miesiączki lub w trakcie krwawienia hemoroidów. 48 godzin przed oddaniem stolca nie należy spożywać alkoholu ani przyjmować leków.
- Wyniki pozytywne lub budzące niepokój należy skonsultować z lekarzem.
- W przypadku uzyskania wyniku negatywnego przy jednoczesnym występowaniu objawów ze strony układu pokarmowego należy skonsultować się z lekarzem.
- Dieta nie ma wpływu na wynik testu.

Ważne:

- Informacje na opakowaniu oraz w instrukcji używania wyraźnie wskazują, że wyrób medyczny przeznaczony jest do samokontroli.
- Posiada oznakowanie CE 0123
- Posiada deklarację zgodności UE.

- Zawiera instrukcję obsługi w **języku polskim**.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w **języku polskim**.

Dystrybutor:

Milapharm sp. z o.o.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.