

# Home Check, Test, na infekcję dróg moczowych, z moczu, 1 sztuka



Cena: 19,90 PLN

## Opis słownikowy

Producent / Marka	Milapharm
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

## Opis produktu

## Wyrób medyczny

## Home Check, Test na infekcje dróg moczowych -1 sztuka

TEST DO SAMOKONTROLI

Szybki, domowy test do wykrywania leukocytów, krwi, azotynów i białka w moczu ludzkim.

### Opis:

Home Check Test Na infekcje dróg moczowych to wyrób medyczny w postaci domowego testu do wykrywania w moczu leukocytów, krwi, azotynów oraz białka. Jego użycie umożliwia diagnostykę infekcji dróg moczowych. Test jest prosty w obsłudze i szybki. Jego wynik jest możliwy do odczytania już w przeciągu 2 minut.

### Wskazania:

Zaleca się wykonanie badania jeśli u pacjenta występują:

- ból podbrzusza,

- częstomocz, pieczenie przy oddawaniu moczu,
- mętny mocz,
- intensywny zapach moczu.

## Przeznaczenie produktu:

- Wyrób medyczny, Home Check Test na infekcje dróg moczowych pozwala wykryć 4 parametry w próbce moczu: leukocyty, krew, azotyny i białko.

## Zawartość opakowania:

Plastikowy kubek, pasek testowy, wzorzec barw, instrukcja obsługi

## Stosowanie produktu:

1. Zebrać mocz do plastikowego pojemnika.
2. Otworzyć saszetkę i wyjąć z niej pasek testowy.
3. Zanurzyć pasek na 1-2 sekundy w moczu. Należy przy tym uważać, by wszystkie obszary testowe zostały zanurzone.
4. Wyjąć pasek i wytrzeć nadmiar moczu o krawędź pojemnika lub chłonny materiał.
5. Odczekać 2 minuty a następnie odczytać wynik, oddzielnie dla każdego parametru porównując go z dostarczonym wzorcem.

## Przeciwwskazania i środki ostrożności:

- Przed przystąpieniem do testu należy zapoznać się z informacją zawartą w ulotce dołączonej do opakowania.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić od światła i wilgoci.
- Produkt jednorazowego użytku. Nie stosować ponownie.

## Uwagi:

- Nie odczytywać wyniku po upływie 3 minut.
- Podczas przyjmowania cefaleksyny i cefalotyny lub wysokie stężenie kwasu szczawiowego może również powodować sztuczne zaniżanie wyników badań.
- Tetracyklina może powodować obniżenie reaktywności, a wysokie stężenie leku może wywołać reakcję fałszywie ujemną.
- Wysoki poziom białka w moczu może zmniejszyć intensywność koloru reakcji.
- Okres menstruacji, zaparcia mogą powodować wynik pozytywny na obszarze odpowiedzialnym za obecność krwi w moczu.
- Wynik testu może być nieprawidłowy, jeśli mocz nie pozostaje długo w pęcherzu, z powodu głodu, diety bez warzyw lub kuracji

antybiotykowej i leków zawierających fenazopirydynę.

- Białko może być obecne w przypadku zapalenia pęcherza moczowego lub gruczołu krokowego albo krwawienia w drogach moczowych. Infuzje zawierające poliwinylpirolidon lub leki zawierające fenazopirydynę mogą dać wynik fałszywie dodatni.

## Stosowanie wyrobu z innymi lekami:

- Na wynik Testu na infekcje dróg moczowych (moczu) mogą mieć wpływ substancje powodujące nieprawidłowy kolor moczu, takie jak leki zawierające barwniki azowe (np. Pyridium, AzoGantrisin, AzoGantanol), nitrofurantoina (Microdantin, Furadantin) i ryboflawina.<sup>1</sup> Rozwój koloru na płytce testowej może być zamaskowany lub może powstać reakcja barwna, która może być interpretowana jako fałszywy wynik.

## Ważne:

- Informacje na opakowaniu oraz w instrukcji używania wyraźnie wskazują, że wyrób medyczny przeznaczony jest do samokontroli.
- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą
- Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE 0123
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w języku polskim
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.

Zawartość netto: 15 tabletek dopochwowych

## Wytwórca:

Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd. Yinihai Street, Hangzhou Economic Technological Development Area Hangzhou, 310018 PR. China

## Importer:

Milapharm Sp. z o.o., 03-464 Warszawa, Pl. Gen. Józefa Hallera 5/14A