

Hyal-Drop multi krople nawilżające 10 ml

Cena: 33,99 PLN



Opis słownikowy

Producent / Marka	DR. GERHARD MANN CHEM.-PHARM. FABRIK GMBH
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Wyrób medyczny

Hyal-Drop multi, krople nawilżające, 10 ml

Wyrób medyczny przeznaczony do nawilżania oczu i zwilżania wszystkich soczewek kontaktowych

Wskazania:

- Hyal-Drop multi to wyrób medyczny, służący nie tylko do nawilżania oczu, ale również do nawilżania i zwilżania miękkich i twardych soczewek kontaktowych podczas noszenia.
- produkt przeznaczony dla osób cierpiących z powodu łagodnych i umiarkowanych objawów suchego oka, takich jak: zmęczenie, podrażnienie, pieczenie i/lub łzawienie.

Działanie:

- szybka ulga dla zmęczonych, podrażnionych i łzawiących oczu
- kwas hialuronowy zawarty w kroplach Hyal-Drop multi ma wpływ na odbudowę warstw filmu łzowego, zwiększa jego stabilność i zapewnia odpowiednie nawilżenie powierzchni oka

Sposób użycia:

- przed użyciem produktu umyj dokładnie ręce.
- zdejmij nakładkę ochronną z końcówki butelki.
- umieść kciuk na ergonomicznym wspierciu dla kciuka i obejmij dolną część butelki palcami. Dwa palce umieść pod spodem butelki.
- odchyl nieznacznie głowę do tyłu.
- odwróć butelkę końcówką do dołu i przytrzymaj pionowo nad okiem.
- palcem wolnej ręki delikatnie odciągnij dolną powiekę.
- naciśnij pompkę, aby uwolnić jedną kroplę do oka.
- po zakropieniu, dla jak najlepszego rozprowadzenia kropli na powierzchni oka, zamknij powiekę i powoli poruszaj gałką oczną.
- natychmiast po użyciu strząśnij pozostałości kropli i nałóż nakładkę ochronną na końcówkę butelki.
- **ważne!** Przed pierwszym użyciem lub po dłuższym nieużywaniu produktu: skieruj butelkę w dół i naciśnij pompkę do momentu pojawienia się pierwszej kropli.

Skład:

- kwas hialuronowy w stężeniu 0,24% (w formie hialuronianu sodu), chlorek sodu, chlorek potasu, disodu fosforan dwunastowodny, sodu diwodorofosforan dwuwodny i woda do wstrzykiwań.

Środki ostrożności:

- nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników wyrobu.
- przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcję użycia zawartą w opakowaniu – zawiera ona ważne informacje na temat stosowania tego produktu.

Przechowywanie:

- chronić przed światłem słonecznym
- przechowywać w temperaturze +1 do +25 °C
- przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci

Ważne:

- **To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.**
- Wyrób medyczny posiada oznakowanie CE 0483
- Posiada deklarację zgodności UE

- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę w języku polskim
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.
- Konstrukcja pompki umożliwia stosowanie kropli Hyal-Drop multi przez 6 miesięcy po otwarciu.
- **Krople Hyal-Drop multi charakteryzują się wysoką tolerancją, ze względu na brak substancji konserwujących w składzie**
- **Nie zawiera środków konserwujących**
- Przed użyciem innego produktu do oczu, należy poczekać co najmniej 15 minut
- Po otwarciu butelki, krople powinny być używane tylko przez jedną osobę
- Aby zapobiec urazowi oka lub zanieczyszczeniu roztworu, nie należy dotykać powierzchni oka końcówką butelki.
- Nie stosować po upływie terminu ważności, ani w przypadku uszkodzenia opakowania lub butelki.

Objętość netto: 10 ml

Producent:

Dr. Gerhard Mann Niemcy

Dystrybutor:

Bausch & Lomb Poland Sp. z o.o. Al. Szucha 13/15 00-580 Warszawa