


Hydrex, Amfetamina Strip, domowy, test, do wykrywania amfetaminy, w moczu, 1 sztuka

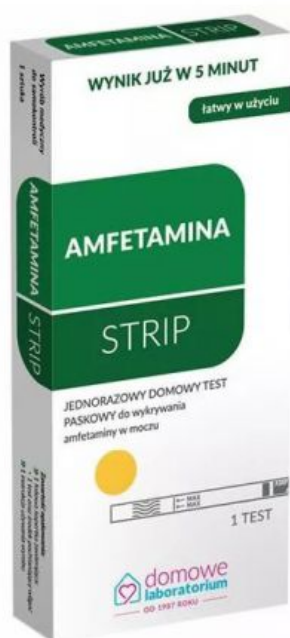

Cena: 15,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Hydrex
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny

DOMOWE LABORATORIUM AMFETAMINA STRIP - 1 SZTUKA

TEST DO SAMOKONTROLI

Jednorazowy, domowy, test paskowy do wykrywania Amfetaminy moczu.

ŁATWY W UŻYCIU WYNIK W 5 MINUT

AMFETAMINA Strip to wygodny w użyciu **narkotykowy test paskowy** umożliwiający **wykrycie obecności amfetaminy w moczu** badanej osoby.

Wynik testu jest wiarygodny w **ponad 99% przypadków**. Wykrycie narkotyku za pomocą AMFETAMINA Strip możliwe jest w **przeciągu 1-3 dni** od momentu zażycia amfetaminy.

Wiarygodność diagnozy utrzymuje się **maksymalnie do 15 minut** od chwili zetknięcia testu z próbką. Po upływie tego czasu nie można już poprawnie zinterpretować uzyskanych rezultatów.

Zasada działania testu:

Zasada działania testu opiera się na reakcji immunologicznej, gdzie wykryta w badanym moczu amfetamina wchodzi w reakcje z naniesionymi fabrycznie na pasek testowy substancjami aktywnymi. W przypadku wyniku pozytywnego, czyli wykrycia obecności narkotyku w organizmie, na pasku pojawia się tylko jeden prążek testowy.

Objawy wskazujące na możliwość zażycia narkotyku:

Zauważalnymi oznakami wskazującymi na możliwość zażycia tego narkotyku jest nadpobudliwość, nerwowość, rozszerzone źrenice słabo reagujące na światło, wahania nastroju, bezsenność, a przy długotrwałym użytku również znaczące spadki wagi ciała.

Sposób użycia:

Wykonanie badania za pomocą AMFETAMINA Strip jest proste i szybkie. Aby poprawnie go przeprowadzić, należy **o dowolnej porze dnia** pobrać próbkę świeżego moczu. Trzeba go oddać do suchego i czystego naczynia. Jeśli bieżące badanie nie jest możliwe, moczu można przechować do 48 godzin w temperaturze od 2 do 8°C. Należy pamiętać, aby przed wykonaniem samego testu wyjąć go z chłodziarki i doprowadzić do temperatury pokojowej.

- Przed wykonaniem badania otwórz foliową kopertę
- Wyjmij test z opakowania. Pamiętaj, aby chwycić za jego górną część i nie dotykać pozostałych fragmentów
- Wyrzuć obecny w opakowaniu środek pochłaniający wilgoć

Badanie rozpocznij od powolnego zanurzenia paska testowego w próbce moczu. Uważaj, aby nie przekroczyć linii oznaczonej słowem MAX. Po upłygnięciu 15 sekund wyciąg pasek i połóż go na płaskiej powierzchni.

Odczekaj 5 minut i pod koniec upływającego czasu odczytaj wyniki z paska testowego.

Wyniki zinterpretowane po czasie dłuższym niż 15 minut będą niewiarygodne, nie należy brać ich pod uwagę. Widocznym znakiem tego jest zmiana intensywności prążków bądź pojawienie się dodatkowego.

Zawartość opakowania:

- Instrukcja obsługi.
- 1 paskowy test diagnostyczny, który wraz z 1 środkiem pochłaniającym wilgoć zapakowany został w szczelnie zamkniętą aluminiową kopertę.
- Do wykonania analizy próbek moczu niezbędny jest zegarek.

Ważne:

- Informacje na opakowaniu oraz w instrukcji używania wyraźnie wskazują, że wyrób medyczny przeznaczony jest do samokontroli.
- Posiada oznakowanie CE 1434
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w języku polskim.

Producent:

- Hydrex Diagnostics Sp. z o.o., Sp. k., ul. T. Zana 4, Warszawa.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.