


Hydrex, CRP, Test, z krwi, infekcja, 1 sztuka

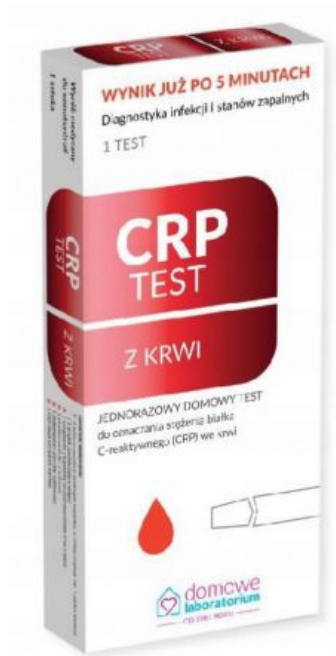

Cena: 31,61 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Hydrex
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny do samokontroli

CRP Test z krwi, Domowe Laboratorium - 1 sztuka

Opis produktu:

Jednorazowy domowy test do oznaczania stężenia białka C-reaktywnego (CRP) we krwi.

CRP Test jest badaniem służącym do **półilościowego oznaczania stężenia białka C-reaktywnego w próbce krwi**. Jeżeli w badanej próbce krwi znajduje się białko C-reaktywne, będzie zachodzić reakcja z przeciwciałami anty-CRP obecnymi w postaci odrębnych linii na płycie testowej. W zależności od poziomu stężenia CRP ukażą się odpowiednie prążki testowe.

Wskazania do wykonania testu:

- Stan podgorączkowy,
- Bóle głowy,
- Gorączka,
- Ogólne osłabienie.

Zanim wybierzemy się do lekarza, **warto sprawdzić, czy infekcja ma podłoże bakteryjne - wymagające antybiotyku, czy wirusowe - wymagające leczenia objawowego** lekami dostępnymi bez recepty.

- **Dodatni wynik testu** - oznacza, że w badanej krwi znajduje się białko C-reaktywne w stężeniu wyższym niż 10 mg/l. Zaleca się konsultację z lekarzem, co umożliwi dalszą diagnostykę, podjęcie skutecznego leczenia i zapobiegnie rozwojowi infekcji. Uwaga! Wynik wskazujący na infekcję bakteryjną powinien być pilnie skonsultowany z lekarzem, szczególnie w przypadku dzieci, ponieważ lekceważenie infekcji bakteryjnej może doprowadzić do poważnych infekcji, a nawet sepsy.
- **Ujemny wynik testu** - oznacza, że w badanej krwi nie zostało wykryte białko C-reaktywne bądź jego stężenie jest mniejsze niż 10 mg/l. Nie wskazuje to na rozwój infekcji bakteryjnej czy wirusowej. Jeśli jednak zauważysz niepokojące objawy, zaleca się konsultację z lekarzem.

Zawartość opakowania:

- Foliowa szczelnie zamknięta koperta, w której znajduje się: 1 płytką testowa i 1 środek pochłaniający wilgoć.
- 1 urządzenie z kapilarką do pobrania próbki krwi z palca.
- 1 plastikowa fiolka z buforem.
- 1 jednorazowy sterylny nakłuwacz.
- 1 instrukcja używania wyboru.

Stosowanie:

1. Zdejmij nasadkę ochronną przekręcając ją o 90 ° i dociśnij nakłuwacz do palca.
 2. Do powstałej kropli krwi przyłóż kapilarkę i poczekaj aż się napęlni.
 3. Włóż cześć urządzenia z kapilarką wypełnioną krwią do fiolki z buforem potrząsaj przez 10 sek. i zostaw na 1 min.
 4. Nanieś na płytkę 3 pełne krople roztworu i odczytaj wynik po 5 min.
- Wynik testu powinien być odczytany po czasie 5 minut od momentu dodania roztworu, a wynik wiarygodny utrzymuje się do 7 minut.
 - Intensywność zabarwienia linii pojawiających się na teście CRP Test nie ma znaczenia dla interpretacji wyniku testu.

Ważne:

- **Informacje na opakowaniu oraz w instrukcji używania wyraźnie wskazują, że wyrób medyczny przeznaczony jest do samokontroli.**
- Posiada oznakowanie CE 1434 (test) CE 0197 (nakłuwacz)
- **Posiada deklarację zgodności UE.**
- Zawiera instrukcję obsługi w **języku polskim.**
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w **języku polskim.**

Producent:

Hydrex Diagnostics Sp. z o.o., Sp. k., ul. T. Zana 4, Warszawa.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.