


## Hydrex, Test Helicobacter z krwi, 1 sztuka

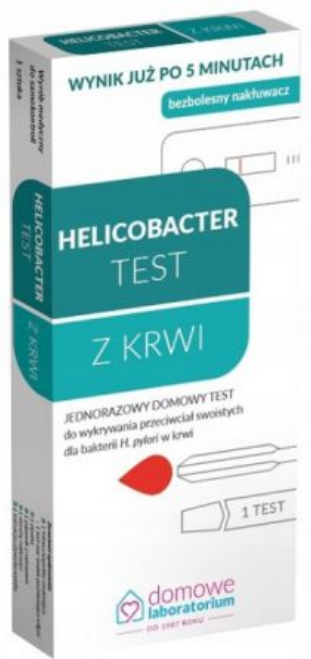

Cena: 19,99 PLN

### Opis słownikowy

Producent / Marka	Hydrex
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

### Opis produktu

## Wyrób medyczny do samokontroli.

## DOMOWE LABORATORIUM SZYBKI JEDNORAZOWY TEST NA HELICOBACTER WE KRWI (IGG) - 1 SZTUKA

BEZBOLESNY NAKŁUWACZ

Szybki test na wykrycie bakterii Helicobacter Pyroli we krwi

Helicobacter pylori to bakteria, która przyczynia się do poważnych stanów zapalnych błony śluzowej żołądka, mogących przekształcić się w chorobę wrzodową, a nawet raka żołądka.

### Jak działa test ?

Wykrywa specyficzne przeciwciała w próbce krwi z palca, wytworzone w organizmie w odpowiedzi na zakażenie bakterią H. pylori.

### Zalety testu:

- Test na wykrycie bakterii Helicobacter w krwi
- Test przeznaczony dla każdego do wykonania w domu
- Wykonywany z próbki krwi pobieranej z palca
- Wyposażony w bezbolesny nakłuwacz
- Wykrywa przeciwciała IgG
- Wynik testu odczytuje się w czasie 15 minut
- Czytelna instrukcja obsługi
- Test jednorazowy

### Jak przeprowadzić test ?

Helicobacter TEST to niezwykle wygodny sposób na przeprowadzenie szybkiego, jednorazowego badania w zaciszu własnego domu.

Opakowanie zawiera:

- Kopertka aluminiowa z testem (powinna być szczelnie zamknięta, w środku znajduje się także pochłaniacz wilgoci)
- Sterylny nakłuwacz
- Plastikowa pipetka do pobrania krwi z palca
- Pojemnik z roztworem, którego 3 krople należy dodać do okienka testowego zawierającego już wprowadzoną wcześniej krew

Pobraną z palca krew, umieszczamy na okrągłe pole testowe. Następnie dodajemy roztwór i czekamy 15 minut na wyniki badania.

**Ważne:**

- **Informacje na opakowaniu oraz w instrukcji używania wyraźnie wskazują, że wyrób medyczny przeznaczony jest do samokontroli.**
- Posiada oznakowanie CE 1434, CE 0197.
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera instrukcję obsługi w **języku polskim**.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w **języku polskim**.

**Producent:** Hydrex Diagnostics Sp. z o.o., Sp. k., ul. T. Zana 4, Warszawa.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.