

Hydrex, Test, Menopauza, przekwitanie, wykrywa hormon FSH, w moczu, 1 sztuka



Cena: 12,83 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Hydrex
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

WYRÓB MEDYCZNY DO SAMOKONTROLI

Test Menopauza - 2 testy

Jednorazowy domowy test płytkowy do oznaczenia poziomu hormonu FSH.

Opis:

Menopauza TEST płytkowy pozwala na zdiagnozowanie początkowego okresu przekwitania u pań.

Dla kobiet proces klimakterium i zatrzymanie comiesięcznego cyklu jest niezwykle trudnym przeżyciem. Obok zanikania funkcji rozrodczych, kobiety zmagają się z różnego rodzaju dolegliwościami, takimi jak uderzenia gorąca czy nerwowość.

Menopauza TEST jednoznacznie wykazuje, czy nieregularne miesiączki lub ich zanik oraz złe samopoczucie związane jest ze zmianami hormonalnymi spowodowanymi wkraczaniem w okres przekwitania.

Test płytkowy Menopauza służy do wykrycia rosnącego stężenia hormonu FSH, które jest równe lub przekroczyło 25 mIU/ml. Taki wzrost jest charakterystycznym efektem poprzedzającym menopauzę, ponieważ wraz ze zmniejszającą się produkcją estrogenów i progesteronu, organizm kobiet wytwarza większość niż dotychczas ilość folikulotropiny (FSH).

Do przeprowadzenia badania wystarczy próbka z pierwszego porannego moczu, który zbieramy do suchego i czystego naczynia. Następnie za pomocą znajdującej się w opakowaniu testu pipetki aplikujemy na okienko płytki testowej 3 krople moczu.

Wynik w postaci różowych prążków uzyskujemy po upływie 5 minut. Interpretacja po czasie dłuższym niż 10 minut nie jest już wiarygodna. W celu poprawnego przeprowadzenia badania należy zapoznać się dokładnie z instrukcją obsługi dołączonej do opakowania.

Prezentowany Menopauza TEST zawiera 2 testy, które pozwalają przeprowadzić 2 niezależne badania. **Drugie badanie należy powtórzyć dokładnie po tygodniu od wykonania pierwszego testu.**

Jak wykonać badanie?

Regularność badania zależy od obserwowanych objawów przekwitania.

- Jeżeli miesiączka jest regularna, test należy wykonać w pierwszym tygodniu cyklu miesięcznego i powtórzyć tydzień później.
- Jeżeli natomiast miesiączkujesz nieregularnie, pierwszy test zrób w dowolnym dniu miesiąca i powtórz próbę po upływie siedmiu dni.

W celu przeprowadzenia testu konieczna będzie próbka świeżego moczu. Należy go oddawać w godzinach porannych po co najmniej 5-godzinnej przerwie. Badany mocz należy pobrać zawsze do czystego i suchego naczynia.

1. Tuż przed wykonaniem próby otwórz foliową kopertkę poprzez jej rozdarcie.
2. Z koperty wyjmij test płytkowy i plastikową pipetkę.
3. W kopertce znajduje się również środek pochłaniający wilgoć, który należy wyrzucić do domowych śmieci.
4. Płytkę testową umieść na poziomej powierzchni.

Zawartość opakowania:

- 1 test oraz środek pochłaniający wilgoć.
- 1 pipetka
- Instrukcja używania.

Ważne:

- Informacje na opakowaniu oraz w instrukcji używania wyraźnie wskazują, że wyrób medyczny przeznaczony jest do samokontroli.
- Posiada oznakowanie CE 1434
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w języku polskim.
- Test zawiera instrukcje użycia w języku polskim.

Producent: Hydrex Diagnostics Sp. z o.o., Sp. k., ul. T. Zana 4, Warszawa.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.