

Hydrex, test, Ogólne badanie moczu, URS 10, 2 sztuki



Cena: 13,50 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Hydrex
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny

DOMOWE LABORATORIUM OGÓLNE BADANIE MOCZU URS 10 TEST - 2 SZTUKI

TEST DO SAMOKONTROLI DO OZNACZANIA 10 PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW MOCZU

Wykrywa 10 parametrów:

- Glukoza,
- Bilirubina,
- Ketony,
- Ciężar właściwy,
- Krew,
- pH,
- Białko,

- Urobilinogen,
- Azotyny
- Leukocyty.

Działanie:

Wyrób medyczny URS 10 Test umożliwia przeprowadzenie kompleksowej analizy moczu obejmującej aż 10 różnych parametrów badawczych, do których należą: glukoza, bilirubina, ciała ketonowe, ciężar właściwy, krew, pH, białko, urobilinogen, azotyny, leukocyty.

Dołączona do testu skala barwna pozwala dokładnie określić poziom odstępstwa uzyskanych wyników od normy.

Test URS 10 stanowi doskonałe narzędzie do wykrywania stanów zapalnych układu moczowego, a także problemów z nerkami czy wątrobą.

Regularne badanie moczu zalecane jest wszystkim osobom:

- Stosującym diety odchudzające lub alternatywne sposoby odżywiania,
- Korzystającym z publicznych basenów,
- Pacjentom z przewlekłymi chorobami nerek,
- Kobietom stosującym dopochwową antykoncepcję,
- Dzieciom z podwyższoną temperaturą o niekreślonym źródle infekcji.
- Za jego pomocą można badać zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Sposób użycia:

1. Pobierz próbkę porannego moczu do czystego i suchego pojemnika.
2. Zanurz test w moczu.
3. Pierwszy odczyt dokonujemy po 30 sekundach, rozpoczynając od glukozy i zniżając po kolei w górę. Na interpretację i zaznaczenie wyników na skali mamy maksymalnie 2 minuty.

Zawartość opakowania:

- 2 folie kopertki, każda zawierająca: 1 test oraz środek pochłaniający wilgoć.
- 2 skale barwne.
- 1 instrukcja używania wyrobu.

Uwagi:

- W celu poprawnego przeprowadzenia badania konieczne należy się zapoznać z załączoną do opakowania instrukcją obsługi.
- Test służy wyłącznie do użytku zewnętrznego.

- Opakowanie z testem należy przechowywać w temperaturze 2-30°C. Nie zamrażać.
- Nie używać testu po dacie ważności umieszczonej na opakowaniu.
- Nie używać testu w przypadku, gdy opakowanie foliowe jest uszkodzone, ponieważ wilgoć z powietrza mogła uszkodzić test.
- Test jest przeznaczony tylko do jednokrotnego użycia.
- Zużyty test usunąć jak każdy inny odpad domowy.
- Test przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Ważne:

- Informacje na opakowaniu oraz w instrukcji używania wyraźnie wskazują, że wyrób medyczny przeznaczony jest do samokontroli.
- Posiada oznakowanie CE 1434
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w języku polskim.

Producent:

- Hydrex Diagnostics Sp. z o.o., Sp. k., ul. T. Zana 4, Warszawa.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.