


Hydrex, Test, Owulacyjny, LH, do oznaczania dni płodnych, 5 testów

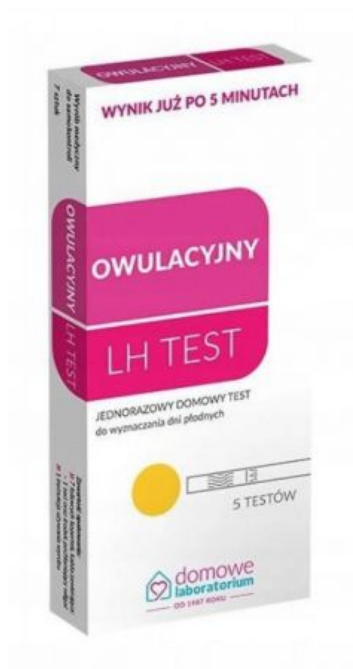

Cena: 9,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Hydrex
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny

Domowe Laboratorium test LH owulacyjny - 5 sztuk

JEDNORAZOWY DOMOWY TEST DO WYZNACZANIA DNI PŁODNYCH.

TEST DO SAMOKONTROLI

Opis:

Owulacyjny LH test to doskonałe wsparcie dla wszystkich osób starających się o własne małżeństwo.

Jest to w pełni profesjonalny, diagnostyczny test paskowy do domowego użytku, wykrywający tzw. pik LH, czyli nagły skok stężenia hormonu luteinizującego w moczu kobiety (minimum 30 mIU/ml), poprzedzający owulację, który wyznacza najdoskonalszy moment na poczęcie w całym cyklu miesięcznym kobiety.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu najbliższe 24-36 godzin możemy wykorzystać na staranie się o swoje dziecko, ponieważ właśnie wtedy mamy największe szanse na zapłodnienie.

Samo przeprowadzenie testu jest naprawdę proste i błyskawiczne. Musimy jedynie pobrać próbki moczu do suchego i czystego

pojemnika, a następnie zanurzyć w nim pasek testowy.

Wyniki otrzymujemy po 5 minutach. Na ich odczytanie mamy jednak niewiele czasu, najlepiej jest to zrobić w ciągu jednej minuty, ponieważ później stają się one niewiarygodne. Dlatego warto na czas testu zaopatrzyć się w zegarek.

Do analizy nie używamy pierwszego moczu porannego. Na 2 godziny przed badaniem nie powinno się również przyjmować żadnych płynów. Wszystko to może spowodować przekłamanie wyników.

Przed zrobieniem testu owulacyjnego konieczne należy zapoznać się z dołączoną do opakowania ulotką. Powyższe opakowanie zawiera aż 7 testów LH, umożliwiających przeprowadzenie 7 niezależnych badań.

LH TEST należy przeprowadzać zawsze o tej samej godzinie, a jego wyniki zapisywać. Dzięki temu stworzymy kalendarz dni płodnych, który ułatwi nam staranie się o wymarzone dziecko.

Jak wykonać badanie:

W pełni profesjonalny, diagnostyczny test paskowy LH TEST stosuje się w celu wykrycia nagłego skoku stężenia hormonu luteinizującego w moczu kobiety. Aby wynik testu był wiarygodny, należy przede wszystkim podjąć odpowiednie kroki przygotowawcze do przeprowadzenia właściwego badania oraz postępować zgodnie z instrukcją obsługi dołączoną do LH TEST.

Przygotowanie do badania:

Przed wykonaniem badania właściwego należy przygotować próbkę moczu w czystym i suchym pojemniku. Co ważne, nie należy wykonywać testu z pierwszego moczu porannego.

Aby zwiększyć efektywność badania oraz uzyskać lepszą wiarygodność wyników, każde badanie powinno zostać wykonane o podobnej porze dnia, a na około 2 godziny przed wykonaniem każdego testu powinno się ograniczyć do niezbędnego minimum spożycie jakichkolwiek płynów. Test, przed przystąpieniem do badania, powinien mieć temperaturę pokojową.

Ważne jest również, aby dokładnie określić, na ile to możliwe, średnią długość cyklu miesięcznego. Liczy się go od pierwszego dnia krwawienia do ostatniego dnia przed następnym krwawieniem miesięczkowym.

Pamiętaj, aby notować na bieżąco wszystkie daty, godziny oraz uzyskane wyniki badań.

Przebieg badania:

Po pierwsze, wyznacz dzień rozpoczęcia badania, doliczając do pierwszego dnia swojej miesiączki liczbę z tabeli.

Dla przykładu:

Długość cyklu miesięcznego wynosi 28 dni. Ostatnia miesiączka rozpoczęła się 2-go dnia danego miesiąca. Z tabeli wynika, że należy doliczyć w kalendarzu 11 dni, poczynając od tego dnia. W rezultacie, dniem, w którym należy rozpocząć badanie z użyciem LH TEST jest 12-ty dzień tego miesiąca.

Jak stosować:

- Otwórz foliową kopertę i wyjmij pasek testowy, trzymając jedynie za jego górną część i nie dotykając pozostałej części testu. Znajdujący się również w kopercie środek pochłaniający wilgoć należy wyrzucić do śmieci.
- Włóż pasek testowy do wcześniej przygotowanej próbki moczu na odpowiednią głębokość (do tzw. linii MAX). Po upływie 10-15 sekund wyjmij pasek testowy z pojemnika i połóż go na poziomej powierzchni płaskiej.
- Monitoruj przemieszczanie się próbki moczu przez strefę testową (T) oraz strefę kontrolną (C) na pasku testowym. Poczekaj, aż pojawią się na nim barwne prążki. Wynik badania możesz odczytać po upływie 5 minut od momentu zanurzenia paska w próbce moczu.

Wynik testu otrzymany po upływie 8 minut nie powinien być brany pod uwagę.

Uwaga:

- Informacje na opakowaniu oraz w instrukcji używania wyraźnie wskazują, że wyrób medyczny przeznaczony jest do samokontroli.
- Posiada oznakowanie CE 1434
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w języku polskim.

Podmiot odpowiedzialny:

Hydrex Diagnostics Sp. z o.o., Sp. k., ul. T. Zana 4, Warszawa.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.