

Hydrex, Test owulacyjny strumieniowy LH, 5 sztuk



Cena: 24,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Hydrex
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny do samokontroli

Hydrex test owulacyjny strumieniowy LH - 5 sztuk

Owulacyjny LH test strumieniowy to doskonałe wsparcie dla wszystkich osób starających się o własne maleństwo.

Opis produktu:

- Owulacyjny Strumieniowy LH TEST jest szybkim testem strumieniowym służącym do wykrywania ludzkiego hormonu LH o stężeniu równym lub wyższym niż 30 mIU/ml. Wykorzystuje on zjawisko nagłego wzrostu poziomu hormonu LH w moczu kobiety.
- Owulacyjny Strumieniowy LH TEST jest prosty w wykonaniu, wystarczy końcówkę testu skierować pod strumień moczu, a wynik w postaci barwnych prążków w okienku wynikowym uzyskuje się w czasie 5 minut.
- Owulacja (jajeczkowanie) jest to proces, w którym dochodzi do uwolnienia z jajnika kobiety dojrzałej komórki jajowej gotowej do zapłodnienia. Komórka jajowa dostaje się do jajowodu, gdzie może zostać zapłodniona, jeśli w ciągu 24 godzin dojdzie do spotkania z nasieniem męczyzny. Mniej więcej w połowie cyklu miesięcznego w organizmie kobiety dochodzi do nagłego wzrostu hormonu luteinizującego (tzw. „pik LH”). Owulacja następuje zwykle w ciągu 24 do 36 godzin po „piku LH” i właśnie w tym czasie zajście w ciążę jest najbardziej prawdopodobne. Należy jednak mieć świadomość, że „pik LH” i owulacja mogą nie wystąpić w każdym cyklu.

Przed wykonaniem badania:

- Nie należy wykonywać badania z pierwszego moczu porannego.
- Dla uzyskania lepszych wyników, każde badanie powinno być wykonane mniej więcej o tej samej porze dnia. Zaleca się notować na bieżąco daty, godziny i wyniki badań.
- Na około 2 godziny przed każdym badaniem należy ograniczyć spożycie płynów.
- Jeśli test był przechowywany w temperaturze 2 - 8°C, to na pół godziny przed wykonaniem badania należy wyjąć go z chłodziarki i doprowadzić jego temperaturę do temperatury pokojowej.
- Badanie można wykonać również z moczu pobranego do suchego i czystego pojemnika.

Materiał do badania:

Próbka moczu.

Czas oczekiwania na wynik:

Wynik testu odczytujemy po upływie 5 minut.

Zawartość opakowania:

- Przed wykonaniem badania należy przygotować papierowy ręcznik i zegarek, który będzie potrzebny do odmierzenia czasu odczytu wyniku testu.
- 5 foliowych szczelnie zamkniętych kopertek, w każdej znajdują się: 1 test strumieniowy i 1 środek pochłaniający wilgoć
- 1 instrukcję używania wyrobu.

Ostrzeżenia:

- W celu poprawnego przeprowadzenia badania koniecznie należy się zapoznać z załączoną do opakowania instrukcją obsługi.
- Test służy wyłącznie do użytku zewnętrznego.
- Opakowanie z testem należy przechowywać w temperaturze 2-30°C. Nie zamrażać.
- Nie używać testu po dacie ważności umieszczonej na opakowaniu.
- Nie używać testu w przypadku, gdy opakowanie foliowe jest uszkodzone, ponieważ wilgoć z powietrza mogła uszkodzić test.
- Test jest przeznaczony tylko do jednokrotnego użycia.
- Zużyty test usunąć jak każdy inny odpad domowy.
- Test przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Ważne:

- Informacje na opakowaniu oraz w instrukcji używania wyraźnie wskazują, że wyrób medyczny przeznaczony jest do

samokontroli.

- Posiada oznakowanie CE 1434
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera instrukcję obsługi w **języku polskim**.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w **języku polskim**.

Producent:

Hydrex Diagnostics Sp. z o.o., Sp. k., ul. T. Zana 4, Warszawa.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.