

HydroClean Plus opatrunek 7,5x7,5cm, 1 sztuka



Cena: 41,53 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Hartman
Substancja czynna	Emplastri collagenosa
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny

HydroClean Plus opatrunek hydroaktywny - 1 sztuka

Rozmiar: 7,5x7,5 cm

Opis produktu:

Wyrób medyczny **HydroClean plus** to **hydroaktywny opatrunek** o wymiarach 7,5 x 7,5 cm. Produkt absorbuje wysięk z rany oraz uwalnia do niej płyn Ringera, dzięki czemu usuwa wszystkie znane miejscowe bariery upośledzające gojenie się rany. Produkt jałowy, do jednokrotnego użytku.

Właściwości:

- Opatrunek **HydroClean plus** usuwa wszystkie znane miejscowe bariery upośledzające gojenie się ran.
- Stymuluje proces gojenia, przywraca równowagę biochemiczną w łożysku rany obniżając poziom aktywnych metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej oraz obniża wartość pH do poziomu fizjologicznego.
- Dzięki swym właściwościom absorpcyjnym wchłania wysięk wraz z martwymi tkankami, włóknikiem, drobnoustrojami oraz biofilmem.
- Produkt posiada nieprzywierające do rany silikonowe paski, warstwa zewnętrzna pokryta jest wodoszczelną folią propylenową, która zapobiega przemakaniu opatrunku.

Zastosowanie:

- Opatrunek przeznaczony jest do stosowania na rany, w szczególności te trudno gojące się, w fazie oczyszczania i rany chirurgiczne.
- Można go także stosować w celu reaktywacji stagnujących procesów gojenia, jeżeli wywołane są zbyt wysoką aktywnością metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej.

Sposób aplikacji:

1. Wybierz odpowiedni rozmiar opatrunku, tak aby obejmował on całą ranę i nachodził na jej brzegi.
2. Umieść opatrunek białą stroną do rany.
3. Przymocuj całość zewnętrznym opatrunkiem mocującym lub opaską.
4. HydroClean może pozostawać na ranie do 3 dni

Środki ostrożności:

- Produkt jednorazowego użytku, nie stosować ponownie.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- opatrunek należy przechowywać w temperaturze pokojowej, poniżej 25oC
- opatrunek należy przechowywać w suchym miejscu

Podmiot odpowiedzialny:

Hartmann, Partyzancka 133/151, Pabianice.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.