

Hydrotac, opatrunek piankowy z warstwą żelu, 1 sztuka

Cena: 22,46 PLN



Opis słownikowy

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Producent / Marka | PAUL HARTMANN POLSKA SP. Z O.O. |
| Substancja czynna | Emplastri conlativi |
| Typ produktu | Wyrób medyczny inny |

Opis produktu

Wyrób medyczny

Hydrotac, opatrunek piankowy z warstwą żelu - 1 sztuka

Rozmiar: 10x20cm

Opis produktu:

HydroTac jest piankowym opatrunkiem, zawierającym oddychającą, nieprzepuszczalną dla cieczy i zarazków folię poliuretanową

Wyrób medyczny

Hydrotac, opatrunek piankowy z warstwą żelu - 1 sztuka

Rozmiar: 10x20cm

Opis produktu:

HydroTac jest piankowym opatrunkiem, zawierającym oddychającą, nieprzepuszczalną dla cieczy i zarazków folię poliuretanową

Skład:

- folia poliuretanowa
- warstwa hydrożelowa składająca się z wodoodpornego hybrydowego polimeru poliuretano-polimocznikowego zawierającego propylenoglikol
- warstwa samoprzylepna pokryta klejem poliakrylanowym

Właściwości:

- zawiera oddychającą, nieprzepuszczalną dla cieczy i bakterii folię poliuretanową, pokrytą warstwą hydrożelu
- dzięki swojej strukturze HydroTac wchłania wysięk z rany i uwalnia wilgoć. Pozwala to na zapewnienie w obrębie rany niezbędnego wilgotnego środowiska działającego stymulująco na gojenie się rany
- warstwa żelowa znajdująca się od strony rany sprawia, że opatrunek nie przywiera do niej co umożliwia jego atraumatyczną zmianę

Zastosowanie:

- opatrywanie ran w fazie ziarninowania i epitalizacji o niewielkim lub umiarkowanym wysięku
- można ciąć do pożądanego rozmiaru przy użyciu jałowych nożyczek
- wymaga dodatkowego mocowania przylepcem (np. Omnifix elastic), bandażem (np. Peha-haft)

Przeciwwskazania:

- uczulenie na którykolwiek składnik opatrunku
- równoczesne stosowanie środków utleniających takich jak roztwory podchlorynu, woda utleniona, ponieważ mogą one uszkodzić warstwę przylegającą do rany

Środki ostrożności:

- przed każdym opatrzeniem rany trudno gojącej się należy skonsultować z lekarzem jej stan oraz określić przyczyny hamujące proces gojenia - w takich przypadkach leczenie ran z zastosowaniem opatrunku HydroTac nie zastąpi leczenia przyczynowego
- można zastosować opatrunek HydroTac do ran zainfekowanych klinicznie oraz w obrębie odstłoniętych kości i ścięgien tylko pod nadzorem lekarza
- można zastosować opatrunek HydroTac w przypadku oparzeń drugiego i trzeciego stopnia pod nadzorem lekarza po przeprowadzeniu nekrosektomii lub leczenia

Działania niepożądane:**Rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):**

- reakcja alergiczna

- reakcja miejscowa na skórze (podrażnienia, zaczerwienienie, obrzęk, itp.)

Uwaga:

- Opatrunku HydroTac nie należy stosować u dzieci poniżej 5 roku życia

Ważne:

- Posiada oznakowanie CE 0123
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera instrukcję obsługi w **języku polskim**.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w **języku polskim**.