


## Icemix sztuczny lód w aerozolu 400ml

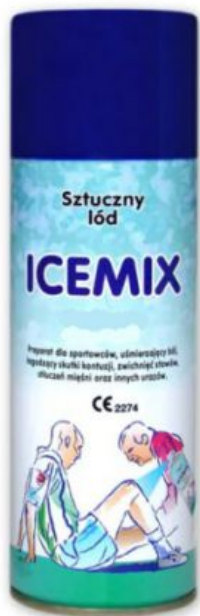

Cena: 10,99 PLN

### Opis słownikowy

Producent / Marka	TECWELD PIEKARY ŚLĄSKIE
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

### Opis produktu

## Wyrób medyczny

### Icemix, sztuczny lód, 400 ml

Preparat dla sportowców , uśmierzający ból, łagodzący skutki kontuzji

### Wskazania:

- przewidziane zastosowanie ICEMIX-u polega na uśmierzaniu bólu poprzez błyskawiczne obniżenie temperatury ciała w miejscu kontuzji.
- umożliwia on podjęcie dalszej aktywności sportowej, nie dopuszczając do tworzenia się krwiaków i sińców.
- urazy mechaniczne typu skręcenia stawów, uderzenia lub stłuczenia. Jednakże wyrób może być stosowany przez wszystkie osoby, które doznały powyższych obrażeń w trakcie codziennej aktywności ruchowej.

### Działanie:

- działa miejscowo znieczulająco wykorzystując działanie zimnem na tkankę.

- działanie zimnem powoduje ograniczenie krwawienia w tkance (siniaki), ogranicza powstawanie obrzęków oraz łagodzi spowodowany tymi efektami ból
- zastosowana kompozycja zapachowa poprawia komfort użytkowania produktu

## Sposób użycia:

- wstrząsnąć przed użyciem
- spryskiwać kontuzjowane miejsca wahadłowym ruchem w odległości 15-20 cm nie dłużej niż 3-5 sekund, nie dopuszczając do pojawienia się białego nalotu.
- czynność można powtórzyć po 5-10 sekundowej przerwie, aż do schłodzenia tkanki.
- nie stosować na błony śluzowe, otarcia i otwarte rany.
- nie spryskiwać przez materiał lub ubranie

## Skład:

- propan, butan oraz dodatki: alkohol izopropylowy, naturalny olejek eteryczny miętowy, naturalny olejek eteryczny eukaliptusowy.

## Środki ostrożności:

- zabrania się stosować preparat na błony śluzowe, otarcia oraz otwarte rany
- **niewłaściwe stosowanie może spowodować odmrożenia skóry**

## Przechowywanie:

- przechowywać w oryginalnym opakowaniu
- nie wystawiać na działanie wysokich temperatur, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu
- przechowywać w suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach w atmosferze wolnej od agresywnych gazów, pyłów i par.
- palenie wzbronione
- nie rozpylać nad otwartym ogniem
- chronić przed światłem słonecznym
- stosować wyłącznie na zewnątrz
- nie wdychać gazu
- nie stosować po upływie terminu ważności (termin podany na opakowaniu) oraz w przypadku, gdy opakowanie jest uszkodzone
- przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- wyrób medyczny przeznaczony do stosowania przez jedną osobę
- nie dziurawić, nie palić nawet pustych opakowań

- nie wystawiać na działanie wysokich temperatur powyżej 50°C

## Ważne:

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Wyrób medyczny posiada oznakowanie CE 2274
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę w języku polskim
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.

**Objętość netto: 400 ml**

## Producent:

Tecweld ul. Krzyżowa 1G 41-909 Bytom

## Dystrybutor:

Tecweld Piotr Polak ul. zmaragdowa 21/3/6 41-943 Piekary Śląskie