

# Iglessy igły do penów insulinowych, 31G 0,25 x 6mm, 100 sztuk



Cena: 18,89 PLN

## Opis słownikowy

Producent / Marka	Synoptis pharma
Substancja czynna	Igły do penów
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

## Opis produktu

## Wyrób medyczny

### Iglessy 31G 0,25 x 6 mm Igły insulinowe - 100 sztuk

Iglessy to sterylne jednorazowe igły do penów insulinowych. Wyrób medyczny przeznaczony do stosowania ze wstrzykiwaczem (penem) do podskórnych iniekcji płynnych leków do organizmu.

### Właściwości:

- Kompatybilne z większością wstrzykiwaczy dostępnych na rynku.
- Sterylnie, nietoksyczne, niepirogenne, cienkościenne.
- Trzyplaszczynowe ostrze pokryte silikonem zapewnia łatwe i bezbolesne wkłucie.
- Łatwy przepływ leku.
- Zgodne z europejską normą EN ISO 11608-2:2012.

### Igły Iglessy są kompatybilne m.in. z:

- NovoPen 4
- NovoPen Echo

- HumaPen savvio
- HumaPen Ergo
- HumaPen LUXURA HD
- Humalog KwikPen
- JuniorSTAR
- SoloStar
- GensuPen 2
- Polhumin Pen

## Sposób użycia:

1. Pociągnąć za etykietkę, aby usunąć ją z igły do wstrzykiwacza.
2. Przymocować igłę do wstrzykiwacza, a następnie przekreślić, aby zabezpieczyć połączenie.
3. Zdjąć zewnętrzną osłonę z igły do wstrzykiwacza.
4. Zdjąć wewnętrzną osłonę z igły do wstrzykiwacza, a następnie postępować zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi wstrzykiwania insuliny.
5. Założyć osłonę zewnętrzną na igłę do wstrzykiwacza oraz wstrzykiwacz.
6. Wyrzucić igłę do wstrzykiwacza do odpowiedniego pojemnika na odpady.

## Ostrzeżenia:

- Igła jest sterylna tylko wtedy, gdy osłony i opakowanie są szczelnie zamknięte i nieuszkodzone.
- Nie używać ponownie.
- Przed wstrzyknięciem należy zdjąć zewnętrzną i wewnętrzną osłonę igły. Jeśli obie osłony nie zostaną usunięte, dawka leku może nie zostać wstrzyknięta, co może skutkować poważnymi komplikacjami zdrowotnymi, a nawet śmiercią.

## Utylizacja:

Zużyte igły zalicza się do materiałów niebezpiecznych biologicznie, które mogą rozprzestrzeniać choroby przenoszone przez krew. Zużyty wyrób należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami w taki sposób, aby uniknąć zranienia lub skażenia.

## Ważne:

- **To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.**
- Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE 0123
- Posiada deklarację zgodności UE

- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę w języku polskim
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.

## Producent:

Shanghai Carelife International Trading C.,Ltd. 1707 Yinqiao Bldg., 58 Jinxin Rd. 201206 Szanghaj, Chiny.

## Dystrybutor:

Synoptis Pharma Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 65, 02-255 Warszawa.