

Inadine, opatrunek, 9,5 x 9,5 cm, odleżyny, owrzodzenia, stopa cukrzycowa, oparzenia, 1 sztuka



Cena: 13,59 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	ASPIRONIX POLSKA SP. Z O.O.
Substancja czynna	Emplastry microfibrillum cellulosae
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny

Inadine, opatrunek, 9,5 x 9,5 cm -1 sztuka

Rozmiar: 9,5x9,5 cm

Opis:

- Wyrób medyczny **Inadine** to jałowy opatrunek z dodatkiem 10% **jodopowidonu**. Przeznaczony jest do stosowania na rany zainfekowane lub zagrożone wystąpieniem infekcji.

Skład:

- Produkt wykonany został z dzianiny wiskozowej o niskiej przywieralności, która impregnowana została glikolem polietylenowym zawierającym 10% jodopowidonu (1,0% dostępnego jodu).

Zawartość opakowania:

- 1 opatrunek o wymiarach 9,5 x 9,5 cm.

Działanie:

- Opatrunek Inadine dzięki zawartości jodu, który jest stale uwalniany do łożyska rany charakteryzuje się szerokim spektrum przeciwbakteryjnym (bakterie gram - i gram +, bakterie beztlenowe), eliminuje także zarodniki, grzyby, drożdżaki i wirusy. Długotrwałe stosowanie opatrunku nie powoduje u bakterii wytworzenia się oporności na jego działanie.
- Opatrunek nie przywiera do rany, więc nie powoduje bólu podczas jego usuwania.

Wskazania:

- Produkt wskazany jest do stosowania na rany powierzchniowe, zainfekowane lub z ryzykiem wystąpienia infekcji (np. rany przewlekłe, otarcia i skaleczenia, odleżyny, rany pooperacyjne).

Charakterystyka produktu:

- Produkt jałowy, jedнокrotnego użytku.
- Można go dowolnie przycinać - opatrunek nie strzępi się.

Sposób użycia wyrobu medycznego

1. Zdejmij papierowe warstwy ochronne.
2. Nałóż opatrunek na ranę.
3. Zastosuj opatrunek wtórny.
4. W celu usunięcia opatrunku delikatnie rozciągnij jego przeciwległe rogi.
 - Opatrunek **Inadine** należy zmieniać, gdy jego kolor zmieni barwę z pomarańczowej na białą.
 - Przeciwwskazania i środki ostrożności
 - Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na jod, przed i po leczeniu izotopem jodu u chorych z zaburzoną czynnością nerek.

Uwagi i środki ostrożności:

- Produkt jedнокrotnego użytku.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
- Ciąża i karmienie piersią
- Nie zaleca się stosowania opatrunku u kobiet ciężarnych i karmiących piersią.

Ważne:

- Posiada oznakowanie CE 2797
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera instrukcję obsługi w **języku polskim**.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w **języku polskim**.