

Irigasin zestaw uzupełniający, 30 saszetek



Cena: 16,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Aflofarm
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny

Irigasin, zestaw uzupełniający do płukania nosa i zatok - 30 saszetek

Zestaw uzupełniający Irigasin przeznaczony jest do przygotowania roztworu do płukania nosa i zatok. W skład jego skład wchodzi 30 saszetek, które umożliwiają sporządzenie izotonicznego lub hipertonicznego roztworu w zależności od potrzeb pacjenta.

- **Roztwór izotoniczny** - pozwala na oczyszczenie jamy nosowej z zalegającej wydzieliny oraz bakterii, wirusów i alergenów, jednocześnie pielęgnując nos i zatoki. Wykazuje również działanie nawilżające na śluzówkę nosa, spowodowane długotrwałym stosowaniem leków lub w następstwie przebywania w klimatyzowanych pomieszczeniach. Polecany jest do stosowania w przypadku zapalenia zatok, infekcji, alergii, przed i po zabiegach chirurgicznych, w przypadku narażenia na wysokie stężenie pyłu w powietrzu oraz profilaktycznie.
- **Roztwór hipertoniczny** - zawiera większe stężenie substancji czynnej, w związku z czym, dzięki osmotycznym właściwościom zmniejsza obrzęk śluzówki. Jego stosowanie zalecane jest w przypadku obrzęku nosa, towarzyszącego nieżytowi nosa w trakcie infekcji lub alergii (katar sienny), a także zapalenia zatok.

Zastosowanie:

Wyrób medyczny wskazany jest do stosowania w następujących przypadkach:

- ostre lub przewlekłe zapalenie zatok przynosowych,
- nieżyt nosa w przebiegu infekcji lub alergii,
- przed i po zabiegach chirurgicznych nosa i zatok,
- po ekspozycji na wysokie stężenie pyłu w powietrzu,
- profilaktycznie dla utrzymania prawidłowej higieny nosa i zatok.

Sposób postępowania z wyrobem:

- Dorośli i dzieci powyżej 4 roku życia: płukanie nosa i zatok należy wykonywać 1-2 razy dziennie lub według zaleceń lekarza.
- Dzieci mogą stosować wyrób jedynie pod kontrolą osoby dorosłej.
- W celu przygotowania roztworu izotonicznego do butelki należy wsypać 1 saszetkę proszku, a następnie uzupełnić ją do zaznaczonej linii 240 ml, przegotowaną, ostudzoną wodą.
- W celu przygotowania roztworu hipertonicznego do butelki należy wsypać 2 saszetki proszku, a następnie uzupełnić ją do zaznaczonej linii 240 ml, przegotowaną, ostudzoną wodą.
- Do płukania należy używać wyłącznie butelki dostępnej w zestawie do płukania nosa i zatok.
- Do każdego płukania stosować świeżo przygotowany roztwór.

Składniki:

Chlorek sodu.

Ostrzeżenia:

- Jeżeli objawy towarzyszące nieżytowi nosa lub zapaleniu zatok się nasilają, należy skonsultować się z lekarzem.
- Po zakończeniu irygacji może pojawić się nieznaczny wyciek pozostałości roztworu z nosa przy pochylaniu.
- Bezpośrednio po irygacji, przez godzinę nie należy się kłaść, żeby pozostałości roztworu nie dostały się do ucha.
- W przypadku przebytej operacji ucha przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.
- Dzieci mogą stosować wyrób jedynie pod kontrolą osoby dorosłej.
- Możliwość stosowania u dzieci poniżej 4 roku życia należy skonsultować z lekarzem.
- Nie stosować później niż na godzinę przed snem.

Przeciwwskazania:

- Nadwrażliwość na chlorek sodu.
- Nie stosować w przypadku całkowitej blokady nosa, uniemożliwiającej wydostanie się roztworu.
- Nie stosować w przypadku infekcji lub uczucia zatkania ucha.

Przechowywania:

- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci, w temperaturze otoczenia, w oryginalnym opakowaniu.
- Chronić od światła i wilgoci.

Ważne:

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Posiada oznakowanie CE
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera instrukcję obsługi w **języku polskim**.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w **języku polskim**.

Masa netto: 64,8 g (30 szt. po 2,16g)

Producent:

Afłofarm Farmacja Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice.