

# Katarek Travel 2w1, aspirator kataru, 1 sztuka



Cena: 57,80 PLN

## Opis słownikowy

Producent / Marka	Duna
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

## Opis produktu

## Wyrób medyczny

### Katarek travel 2w1 aspirator kataru

Dla dzieci od 0 - 6 lat

Aspirator Katarek Travel to urządzenie, dzięki któremu skutecznie, szybko i bezpiecznie odciągniesz zalegający w nosku dziecka katar.

Katarek Travel to nasza nowość i urządzenie typu 2w1, które umożliwi odciągnięcie dziecku kataru wszędzie tam, gdzie nie możesz zabrać odkurzacza.

#### Jeśli:

- Nie chcesz rezygnować ze spacerów na świeżym powietrzu nawet gdy maluch ma lekki katar.
- Często podróżujesz samochodem, pociągiem czy komunikacją miejską.
- Nie chcesz rezygnować ze spotkania z przyjaciółką czy wizyty u dziadków pomimo lekkiego kataru malucha.
- Planujesz wakacje i czeka cię długa podróż.

Katarek Travel 2w1 będzie doskonałym wyborem.

Gdy nie masz możliwości użycia odkurzacza, możesz w prosty sposób zmienić końcówkę i wykorzystać siłę swoich płuc, by pozbyć się nieprzyjemnej wydzieliny z noska malucha. Katar zbiera się w pojemniczku w komorze aspiratora, którą bez problemu rozkręcisz, by wyczyścić urządzenie.

Pamiętaj jednak, że aspirację ustną powinnaś wykonywać tylko wtedy, gdy nie masz możliwości podłączenia odkurzacza lub w

przypadku, gdy katar jest lekki i wodnisty.

Po każdej aspiracji wyczyść urządzenie pod bieżącą, ciepłą wodą, używając dołączonej do zestawu szczoteczki.

#### **Użycie aspiratora podłączonego do odkurzacza:**

Katarek Travel to aspirator, który łączy dwa rozwiązania w jednym urządzeniu. Podłączony do domowego odkurzacza (o mocy 800/1800W) zaledwie w kilka sekund usuwa z noska dziecka zalegającą wydzielinę i pozwala mu swobodnie oddychać.

Zaaplikuj do noska malucha kilka kropli soli fizjologicznej, która rozrzedzi wydzielinę, a tym samym usprawni aspirację. Podłącz aspirator do rury odkurzacza i uruchom domowe urządzenie. Końcówkę przyłóż na kilka sekund do każdej z dziurek i gotowe. Wykorzystaj pozostałą w ampułce sól fizjologiczną - ponownie wprowadź kilka kropli do noska, żeby nawilżyć jego błonę śluzową, a tym samym przyspieszyć regenerację.

Maluch ma czysty, drożny nosek, dzięki któremu swobodnie oddycha, jest spokojny i w końcu może zasnąć czy zjeść bez problemu. Aspirację możesz powtarzać tyle razy w ciągu dnia, ile potrzebujesz.

#### **Użycie aspiratora ustnego:**

Końcówki ustnej użyjesz wszędzie tam, gdzie nie podłączysz odkurzacza - w samochodzie, w podróży, na wakacjach, na spacerze. Aspiracja ustna jest skuteczna w przypadku lekkich, wodnistych katarów. Ten sposób jest także dobry do codziennej higienizacji noska dziecka - usuwania z niego drobnych paproszków czy zaschniętych grudek.

#### **Mycie:**

Części aspiratora myć bezpośrednio po użyciu ciepłą wodą o jakości wody pitnej oraz detergentami przyjaznym dla dzieci.

#### **Dezynfekcja:**

Przetrzeć zewnętrzną stronę aspiratora miękką ściereczką lub wacikiem nasączonym alkoholem etylowym klasy farmaceutycznej.

#### **W zestawie:**

- Aspirator kataru z rozkręcaną komorą.
- 2 końcówki do noska.
- Końcówkę do odkurzacza.
- Końcówkę do aspiracji ustnej.
- Szczoteczka.
- Kosmetyczkę podróżną - opakowanie.

#### **Uwagi:**

- W przypadku hemofilii lub częstego krwawienia z nosa skontaktuj się z lekarzem.
- Używaj odkurzacza po mocy 800-1800 W.
- Zapoznaj się z instrukcją obsługi odkurzacza.
- Nie używaj innych detergentów, środków chemicznych ani materiałów ściernych.
- Rozkręcana komora.

## Ważne:

- Posiada oznakowanie CE 0123
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera instrukcję obsługi w **języku polskim**.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w **języku polskim**.

**Dystrybutor:** DUNA Sp. z o.o., ul. Dobrego Pasterza 100, Kraków.