

KEJ, Gruszka z kanką nr 5



Cena: 7,49 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	PPHU KEJ
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny

KEJ, Gruszka z kanką nr 5

Wskazania:

Gruszka do lewatywy przeznaczona dla niemowląt i dzieci do 12. miesiąca życia to wyrób medyczny stosowany do przeprowadzania lewatywy doodbytniczej w celu łagodzenia zaparć oraz kolek brzusznych u najmłodszych. Dzięki specjalnej konstrukcji i niewielkiej pojemności, może być stosowana u noworodków od pierwszych dni życia. Jest to profesjonalny produkt medyczny wykonany z wysokiej jakości materiałów, który jest bezpieczny dla skóry, nawet tej wrażliwej, co jest typowe dla wielu niemowląt.

Właściwości:

Gruszkę do lewatywy dla niemowląt zaleca się używać przede wszystkim:

- przed zabiegami chirurgicznymi w obrębie jamy brzusznej,
- w celu łagodzenia zaparć,
- w przypadku bolesnych kolek brzusznych.

Sposób użycia:

1. Przed każdym użyciem gruszki z kanką do wykonania lewatywy, jak i po jej zakończeniu, należy starannie ją umyć w ciepłej wodzie z mydłem, oddzielając kankę od gruszki.
2. Wymyte części wygotować w wodzie przez 10 minut. Następnie zamontować kankę, wkładając jej krótszy koniec do otworu gruszki, aż do oparcia się kołnierzyka kanki o krawędź gruszki. Napełnić gruszki rumiankiem, roztworem soli fizjologicznej lub innym roztworem zaleconym przez lekarza.
3. Zastosowana ciecz powinna mieć temperaturę od 32°C do 34°C. Kankę posmarować cienką warstwą wazeliny kosmetycznej i powoli wprowadzić do odbytu bez wywierania ucisku, po czym nacisnąć gruszkę w taki sposób, aby opróżnić jej zawartość do jelita.
4. Po wykonaniu tej czynności ścisnąć pośladki i wyjąć kankę z odbytu. Dla zapobieżenia wycieku wprowadzonego płynu należy jeszcze przez kilka minut trzymać ściśnięte pośladki.

Specyfikacja techniczna:

Parametry gruszki nr 5 z kanką:

- pojemność: 55 ml
- średnica: 55 mm
- wysokość: 125 mm

Uwagi:

- Lewatywa u dzieci poniżej 3. roku życia powinna być przeprowadzana wyłącznie pod stałym nadzorem lekarza i w warunkach odpowiadających szpitalnym.
- Każde wykonanie lewatywy winno być skonsultowane z lekarzem.
- Gruszki z kanką są wyrobami indywidualnego użytku.
- Lewatywy nie należą wykonywać samodzielnie.
- Zabrania się wykonywać lewatywy przez dzieci.
- Lewatywy mogą być wykonywane w warunkach domowych bądź szpitalnych.

Przechowywanie:

- Przechowywać w czystym i suchym miejscu.

Ważne:

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE
- Posiada deklarację zgodności UE

- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę w języku polskim
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.

Producent:

PPHU KEJ Sp. z o.o. Cikowice 241, 32-700 Bochnia

Dystrybutor:

PPHU KEJ Sp. z o.o. Cikowice 241, 32-700 Bochnia