

KICK THE TICK EXPERT Zestaw do bezpiecznego usuwania kleszczy, 1 szt. (zestaw)

Cena: 35,99 PLN



Opis słownikowy

Producent / Marka	ICB PHARMA SP.J.
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Wyrób medyczny

KICK THE TICK® EXPERT Zestaw do bezpiecznego usuwania kleszczy - 9 ml

KICK THE TICK EXPERT Zestaw do bezpiecznego usuwania kleszczy, umożliwia szybkie i samodzielne wykonanie zabiegu, co ogranicza ryzyko zakażenia chorobami przenoszonymi przez kleszcze. Przeznaczony do usuwania kleszczy u ludzi i zwierząt.

Zestaw KICK THE TICK® expert jest wyrobem medycznym, który umożliwia samodzielne i bezpieczne usuwanie kleszczy u ludzi oraz zwierząt. Zalecany jest do stosowania w celu ograniczenia zakażenia chorobami przenoszonymi przez kleszcze, takimi jak: kleszczowe zapalenie mózgu, borelioza, babeszjoza, anaplazmoza i inne. Zastosowanie aplikatora powoduje natychmiastowe zamrożenie kleszcza i zatrzymanie jego funkcji metabolicznych. Dodatkowo tworzy na ciele pasożyta powłokę zapobiegającą jego rozerwaniu podczas zabiegu. Zalety preparatu: umożliwia samodzielne, szybkie i bezpieczne usunięcie kleszcza; ogranicza ryzyko zakażenia; zmniejsza ryzyko rozerwania ciała kleszcza podczas zabiegu; nie zawiera środków owadobójczych; wystarcza na usunięcie ok. 40 kleszczy. Zestaw zawiera komplet akcesoriów potrzebnych do usunięcia pasożyta. Jest łatwy i wygodny w użyciu.

Sposób użycia:

1. Odpiąć przyrząd do usuwania kleszczy od aplikatora.
2. Odbezpieczyć aplikator poprzez przekręcenie pierścienia z pozycji zamkniętej do otwartej.

3. Przyłożyć dyszę aplikatora do kleszcza.
4. Nacisnąć przycisk aplikatora do oporu, aby uwolnić pełną dawkę preparatu (ilość dawek należy dostosować do wielkości kleszcza - mały kleszcz - jedna dawka, duży kleszcz - dwie dawki)
5. Przy pomocy odpowiednio dobranej końcówki przyrządu do usuwania kleszczy należy mocno uchwycić przyczepionego kleszcza jak najbliżej powierzchni skóry.
6. Lekko okręcając, wyciągnąć kleszcza płynnym ruchem ku górze.
7. Sprawdzić czy w miejscu wkłucia nie pozostały fragmenty ciała kleszcza dezynfekować miejsce po usunięciu kleszcza.

Skład:

izoheksadekan, mirystynian izopropylu, 1,3,3,3, - tetrafluoropropen, 1,1,1,2,- tetrafluoroetan.

Środki ostrożności:

- Wyrób stosować zgodnie z przeznaczeniem, przestrzegając instrukcji używania.
- Nie stosować u dzieci poniżej 3 roku życia.
- W przypadku stosowania wyrobu u dzieci zabieg należy przeprowadzać pod kontrolą osoby dorosłej.
- Nie stosować na skórę zmienioną chorobowo.
- Nie stosować w przypadku stwierdzenia nadwrażliwości (alergii) na którykolwiek składnik wyrobu.

Ważne:

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Posiada oznakowanie CE
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera instrukcję obsługi w **języku polskim**.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w **języku polskim**.

Przechowywanie:

Wyrób przechowywać w oryginalnym opakowaniu w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent:

ICB Pharma Tomasz Świętosławski Sp. J., ul. Moździerzowców 6a, 43-602 Jaworzno.