

Kompres żelowy ciepło/zimno Sanity rozmiar 10x26cm



Cena: 21,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	ALBERT POLSKA SP. Z O.O.
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny

Sanity, Kompres Flex Standard, 1 sztuka

ROZMIAR 10x26 CM

Wygodna i skuteczna alternatywa dla tradycyjnych kompresów

Kompres żelowy przystosowany jest do schładzania w zamrażarce i podgrzewania w mikrofalówce lub gorącej wodzie.

W zestawie znajduje się miękki pokrowiec, w którym należy umieścić kompres po jego użyciu i osuszeniu. Zabezpiecza go przed uszkodzeniami oraz zabrudzeniami.

Kompres FLEX Standard przeznaczony jest do stosowania:

- przez osoby aktywne, a także zmagające się z dokuczliwymi dolegliwościami bólowymi.
- Jest wsparciem dla rodziców, którzy chcą szybko i skutecznie obniżyć gorączkę u swoich maluszków.
- sprawdza się zarówno w terapii chłodzącej, jak też rozgrzewającej.
- to alternatywa dla tradycyjnych okładów wykonywanych z wykorzystaniem zimnej i ciepłej wody.
- cechuje się wysoką jakością wykonania z wykorzystaniem bezpiecznych dla ciała i organizmu człowieka materiałów.

- ma wszechstronne zastosowanie przy przewlekłym bólu, urazach mięśni i stawów, skręceniach, migrenie, reumatoidalnym zapaleniu stawów oraz gorączce.
- W czasie ciąży lub karmienia piersią zimne kompresy przynoszą ulgę w przypadku bolących piersi, łagodzą stany zapalne, zmniejszają obrzęki i uczucie nadwrażliwości.

Zalety Kompresu FLEX Standard:

- uniwersalny rozmiar i format prostokąta o wymiarach 10x26 cm
- do chłodzenia w zamrażarce i ogrzania w mikrofalówce lub gorącej wodzie
- bezpieczny i wygodny w stosowaniu
- wielofunkcyjny, przeznaczony do wykonywania okładów zimnych i ciepłych
- możliwość stosowania na wszystkie obszary ciała
- zachowuje elastyczność przy temperaturze do -18 st. Celsjusza
- wielokrotne użytkowanie
- długi czas oddawania ciepła i zimna
- brak toksycznych substancji

Zastosowanie:

ZIMNE OKŁADY

- Pomaga w urazach, takich jak skręcenia i zwichnięcia stawów dłoni, stłuczenia ręki, naderwanie ścięgien. Łagodzi przewlekły ból spowodowany urazami układu mięśniowo-szkieletowego, a także bóle zębów i głowy.
- Zmniejsza obrzęk, stany zapalne, zaczerwienienia.
- Przyspiesza wchłaniania krwiaków, siniaków, łagodzenia drobnych stłuczeń.
- Obniża temperaturę ciała w trakcie gorączki, łagodzi poparzenia.
- Pomaga zatamować krwotok z nosa.

CIEPŁE OKŁADY

- Wspomaga leczenie przewlekłego bólu mięśniowo-szkieletowego.
- Ogranicza skurcze mięśni (np. ból pleców, bóle menstruacyjne, skurcze nóg).
- Przynosi ulgę w trakcie reumatoidalnego zapalenia stawów i bólu.

Instrukcja użytkowania:

ZIMNE OKŁADY

- umieść kompres w zamrażarce na minimum 2 godziny w temperaturze -18°C.
- osusz kompres przed umieszczeniem go w pokrowcu.
- połóż kompres na odpowiedniej części ciała.
- trzymaj kompres na ciele, dopóki będzie to dla Ciebie komfortowe,
- maksymalnie do 20 minut.
- przed ponownym użyciem kompresu na tę samą część ciała,
- pozostaw to miejsce odkryte przez 20 minut.

CIEPŁE OKŁADY

- zagotuj odpowiednią ilość wody w naczyniu, tak aby można było całkowicie zanurzyć w niej kompres.
- zdejmij wodę z kuchenki i ogrzewaj kompres w kąpeli wodnej przez ok. 60 s. (Mini/Standard), 90s. (Medium/Max)
- wyjmij kompres z wody i dokładnie ugnieć jego powierzchnię.

kuchenka mikrofalowa

- połóż kompres na płasko w kuchence, tak aby żel był równomiernie rozłożony. Pamiętaj, że nigdy nie wolno podgrzewać zagiętego kompresu!
- kompres podgrzewaj w kuchence mikrofalowej przez 27 sekund (moc 510 W)
- po każdym cyklu podgrzewania ugnieć dokładnie kompres i wyrównaj żel, tak aby był równomiernie rozłożony.

Przechowywanie:

- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Ważne:

- **To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.**
- Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę w języku polskim
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.
- Przyjazny dla środowiska żel. biodegradowalny w 99,8%

Producent/Dystrybutor:

Albert Polska sp. z o.o. ul. Obwodowa 4A 32-410 Dobczyce