

Laktator manualny easy comfort Sanity



Cena: 53,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	ALBERT POLSKA SP. Z O.O.
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny

Sanity, Laktator manualny, easy comfort

Laktator manualny EASY COMFORT (model AP 5419) to nowoczesny odciągacz dla karmiących matek. Jest delikatny, cichy i dopasowany do piersi. Zapewnia odciąganie mleka w naturalnej pozycji, bez pochylania

Ze względu na małą liczbę elementów składa się go łatwo i intuicyjnie.

Montaż laktatora:

- przed przystąpieniem do użycia laktatora należy dokładnie umyć ręce
- umyć piersi przed użyciem przyrządu
- wcisnąć tłoczek w cylinder
- wprowadzić cylinder do korpusu laktatora (do samego końca).
- zamocować wkładkę silikonową w korpusie laktatora i upewnić się, że połączenie jest szczelne
- zamocować rączkę (nacięcie pod tłoczkiem), aż do usłyszenia dźwięku świadczącego o jego prawidłowym

zablokowaniu. Następnie nałożyć nasadkę cylindra

- zainstalować zawór w korpusie laktatora. (Uważać, aby nie uszkodzić zaworu)
- do korpusu wkręcić butelkę

Sposób użycia:

- przed pierwszym użyciem umieścić na 5 minut we wrzącej wodzie.
- ma to na celu zapewnienie higieny. czyścić przed każdym użyciem.
- przed rozpoczęciem użytkowania laktatora należy dokładnie umyć ręce, upewnić się, że laktator został prawidłowo zamontowany
- należy usiąść wygodnie, w naturalnej pozycji i zrelaksować się – można oglądać telewizję lub słuchać ulubionej muzyki i przygotować się do odciągania mleka.
- przyłożyć laktator do piersi tak, aby brodawka znajdowała się pośrodku miseczki. Istotne jest, by silikonowa wkładka szczelnie przylegała do piersi
- naciskać i zwalniać nacisk na rączkę, symulując w ten sposób ssanie dziecka, aż mleko zacznie płynąć.
- po skończeniu pompowania wyjąć butelkę.
- nałożyć nakładkę uszczelniającą i umieścić butelkę w lodówce.

Zestaw zawiera:

- nakładkę higieniczną
- wkładkę silikonową
- nakładkę uszczelniającą
- nasadkę cylindra
- cylinder
- tłoczek
- rączkę
- korpus, zawór
- butelkę

Przechowywanie odciągniętego mleka:

Odciągnięcie 60-120 ml (2-4 OZ) mleka z każdej piersi zwykle zajmuje 10 minut. Ta informacja jest jedynie szacunkowa. W razie stwierdzenia, że ilość odciąganego mleka jest większa niż 120 ml (4 OZ) należy wymienić butelkę na większą.

Metody przechowywania odciągniętego mleka:

- odciągnięte mleko można przechowywać w lodówce przez 48 godzin w temp. ok. 4°C
- zamrożenie mleka wymaga pozostawienia wolnej przestrzeni w górnej części butelki
- nie przechowywać mleka w drzwiczkach lodówki
- w celu zachowania właściwości odżywczych w odciągniętym mleku należy je rozmrozić trzymając w lodówce przez całą noc lub użyć podgrzewacza do butelek z temperaturą ustawioną na 40°C.
- nie wolno rozmrażać lub podgrzewać mleka w kuchence mikrofalowej

Czyszczenie i dezynfekcja:

- umyj dokładnie wszystkie części płynem do mycia i wypłucz.
- zdezynfekuj części zgodnie z instrukcją producenta sterylizatora zalecane jest zastosowanie jednej z następujących metod dezynfekcji: **wrzącą wodą, sterylizacja mikrofalowa, parowa, UV lub sterylizacja poprzez użycie zmywarki**
- należy pamiętać, by temperatura nie przekraczała 120°C
- osusz wszystkie części przed ponownym złożeniem

Przechowywanie:

- przechowywać w oryginalnym opakowaniu
- przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła lub światła.
- nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone.
- nie przechowywać lub pozostawiać na słońcu lub w pobliżu źródła ciepła
- nie przechowywać razem z rozpuszczalnikami lub agresywnymi środkami chemicznymi lub dopuszczać do kontaktu z nimi
- przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci

Środki ostrożności:

- upewnić się, że wszystkie elementy są połączone prawidłowo
- upewnić się, że wkładka silikonowa na miseczce szczelnie przylega do piersi
- upewnić się, że zawór jest czysty i nieuszkodzony

Ważne:

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim

- Zawiera etykietę w języku polskim
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.
- Jest wykonany z bezpiecznych i certyfikowanych materiałów
- Zawsze używać wyrobu pod nadzorem dorosłych.
- Nigdy nie używać smoczków na butelki jako smoczków do uspokajania. Ciągłe i przedłużone ssanie płynów może powodować próchnicę.
- Zawsze sprawdzać temperaturę pokarmu przed karmieniem.
- Umyć produkt przed pierwszym użyciem.
- Zawsze bezpośrednio po użyciu produktu należy go umyć.
- Myć ciepłą wodą z mydłem i płukać czystą wodą lub użyć zmywarki. Nie należy myć przy użyciu rozpuszczalników lub agresywnych środków chemicznych.
- 2 lata gwarancji
- Nie zawiera bisfenolu

Producent:

Albert Polska sp. z o.o. ul. Obwodowa 4A 32-410 Dobczyce

Dystrybutor:

Albert Polska sp. z o.o. ul. Obwodowa 4A 32-410 Dobczyce