

# Marimer, Woda morska, Spray hipertoniczny, 100 ml



Cena: 29,99 PLN

## Opis słownikowy

Producent / Marka	Glenmark Pharmaceuticals
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny leczniczy

## Opis produktu

## Wyrób medyczny

### Marimer, woda morska, Spray hipertoniczny, 100 ml

#### Wskazania:

Marimer hipertoniczny spray do nosa to **100% roztwór wody morskiej**, stworzony z myślą o całej rodzinie, służący do **udrażniania i oczyszczania jam nosowych**. Może być stosowany codziennie, jednak szczególnie zaleca się go w czasie **przeziębienia, kataru oraz po operacjach**, gdy usunięcie zalegającej wydzieliny staje się trudne. Roztwór wody morskiej jest **bezpieczny i odpowiedni dla dorosłych, dzieci oraz niemowląt**.

Spray Marimer Hipertoniczny wykorzystuje system mikrodyfuzji, który, w połączeniu z mechanicznym działaniem roztworu wody morskiej, ułatwia **usuwanie zalegającej wydzieliny**. **Kształt dyfuzora umożliwia wygodne umiejscowienie go w otworze nosowym**, nawet u dzieci, co **zapewnia łatwą i precyzyjną aplikację**. Oczyszczanie jam nosowych w czasie przeziębienia i kataru **zmniejsza ryzyko stanów zapalnych oraz chroni błonę śluzową przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi**.

#### Właściwości:

Spray przeznaczony jest do:

- Marimer hipertoniczny spray jest **przeznaczony do oczyszczania i udrażniania jamy nosowej**. Może być stosowany przez

dorosłych oraz dzieci, w tym niemowlęta **od 1. dnia życia**.

## Sposób użycia:

- Włóż końcówkę do nosa, przechyl głowę na bok i rozpyli spray (1-2 dawki) do górnego nozdrza.
- Powtórz tę samą czynność w drugim nozdrzu.
- Następnie wyprostuj głowę, aby wydzielina mogła spłynąć, a nadmiar roztworu wytrzyj lub wydmuchaj nos.
- Spray można stosować od 1 do 3 razy dziennie, w zależności od potrzeb. Po każdym użyciu umyj aplikator ciepłą wodą z mydłem, opłucz i osusz.

**Dawkowanie:** 1 dawkę do każdego otworu nowego, 1 do 3 razy dziennie w zależności od potrzeb.

## Skład:

Sterylny hipertoniczny 100% roztwór wody morskiej (odpowiednik 22 g/l soli)

## Uwagi:

- Nie stosować u wcześniaków.
- Unikać stosowania w przypadku nadwrażliwości na wodę morską.
- Przed zastosowaniem u noworodków, niemowląt i małych dzieci z chorobami powodującymi zwężenie dróg oddechowych, jak astma, należy skonsultować się z farmaceutą lub lekarzem.
- Aby poprawić penetrację preparatu do jam nosa podczas aplikacji, można delikatnie wciągać roztwór nosem.

## Przechowywanie:

- Przechowywać z dala od źródeł ciepła
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Nie należy stosować preparatu po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
- Przed zastosowaniem wyrobu medycznego należy dokładnie przeczytać instrukcję używania.

## Ważne:

- **To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.**
- Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE 0459
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę w języku polskim

- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.

## Producent:

Laboratoires Gilbert, 928 Avenue du Général de Gaulle 14200 Hérouville Saint-Clair, Francja.

## Dystrybutor:

Glenmark Pharmaceuticals Sp. z o.o. ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa