

# Microdacyn 60 Hydrogel, elektrolizowany hydrożel na rany, 120g



Cena: 48,41 PLN

## Opis słownikowy

Producent / Marka	KIKGEL SP. Z O.O.
Substancja czynna	Emplastry hydropolymerosa
Typ produktu	Wyrób medyczny leczniczy

## Opis produktu

## Wyrób medyczny

### Microdacyn 60 Hydrogel, elektrolizowany hydrożel na rany, 120g

#### Wskazania do stosowania:

- Microdacyn60" Hydrogel to elektrolizowany hydrożel przeznaczony do stosowania w opracowywaniu i nawilżaniu ostrych i przewlekłych ran, wrzodów, nacięć, otarć i oparzeń, w tym znajdujących się w dowolnej jamie ludzkiego ciała, np. ustnej, nosowej lub jamie ucha.
- Podchloryn sodu i kwas podchloryny to substancje pomocnicze, które mogą wykazywać miejscowe działanie przeciwdrobnoustrojowe.
- Obniżając ilość drobnoustrojów i ułatwiając wytworzenie wilgotnego środowiska, roztwór ten umożliwia organizmowi przeprowadzanie procesów gojenia.
- Produkt Microdacyn" Hydrogel może być szeroko wykorzystywany w kompleksowym leczeniu ran i może być bezpiecznie stosowany na błony śluzowe.

## Składniki:

- Woda Elektrolizowana, Chlorek Sodu, Fluorokrzemian Sodowo-magnezowy, Fosforan Sodu, substancje pomocnicze: Podchloryn Sodu i Kwas Podchlorawy.

## Postępowanie z produktem:

- Postępowanie z produktem: Microdacyn60<sup>®</sup> Hydrogel to produkt biozgodny w zakresie wskazanego zastosowania, który nie drażni ludzkiej skóry, oczu ani gardła, a do tego nie jest środkiem uczulającym skórę.
- Nie są wymagane żadne specjalne środki ostrożności dotyczące postępowania z produktem.

## Stabilność:

- Stabilność nieotwartego produktu jest zagwarantowana od daty produkcji do terminu ważności (termin ważności podano na etykiecie produktu).
- Po otwarciu stabilność gwarantuje się przez okres do 60 dni. Po otwarciu należy zapisać datę na butelce w miejscu "Date opened" (Data otwarcia).

## Wskazówki dla użytkownika:

- Produkt Microdacyn<sup>®</sup> Hydrogel jest gotowy do użycia bez potrzeby mieszania czy rozcieńczania.
- Przed oczyszczeniem obszaru lub użyciem produktu należy odpowiednio umyć ręce.
- Produkt Microdacyn60<sup>®</sup> Hydrogel należy nakładać bezpośrednio na obszar objęty zmianami.

## Stosowanie:

- Przed oczyszczeniem obszaru lub użyciem produktu należy odpowiednio umyć ręce.
- Oczyszczyć obszar i wytrzeć do sucha.
- Nałożyć cienką warstwę produktu Microdacyn Hydrogel na obszar objęty zmianami i bezpośrednio go otaczający.
- Produktu należy używać raz lub dwa razy dziennie oraz przykrywać bandażem.

## Ostrzeżenia i uwagi:

- Jeśli zabezpieczenie chroniące przed otwarciem jest przerwane, nie należy używać produktu
- Wyłącznie do użytku zewnętrznego.
- Produkt nie jest przeznaczony do wstrzykiwania ani spożywania,
- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na składniki produktu
- Nie należy używać produktu Microdacyn Hydrogel w kojarzenia z innymi produktami stosowanymi miejscowo bez konsultacji z pracownikiem służby zdrowia.

- W przypadku głębokich lub poważnych ran bądź w przypadku innych wątpliwości dotyczących leczenia należy się skonsultować z pracownikiem służby zdrowia.
- W przypadku wystąpienia objawów zakażenia (nasilenie bólu, krwawienie, ropa) lub w sytuacji, gdy rana nie wykazuje oznak gojenia, należy się skonsultować z pracownikiem służby zdrowia.
- Wszelkie działania niepożądane należy zgłaszać pracownikowi służby zdrowia.
- Podczas stosowania produktu w niektórych wypadkach może być konieczne dodatkowe użycie antybiotyków działających ogólnoustrojowo i (lub) miejscowo
- Nieużywany pojemnik powinien być zamknięty
- Produkt Microdacyn Hydrogel jest nieszkodliwy nawet w razie przypadkowego kontaktu z oczami lub nosem lub w przypadku spożycia.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci

## Przechowywanie:

- Microdacyn60 Hydrogel należy przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze pokojowej.
- Produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej i chronić przed zamarznięciem.
- Produkt jest niepalny.
- Po użyciu pojemnik należy ponownie zamknąć, przed przeniesieniem do miejsca przechowywania.
- **Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla małych dzieci**

## Ważne:

- **To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.**
- Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE 1011
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę w języku polskim
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla małych dzieci.

Masa netto:120g

## Producent

Oculus Technologies Of Mexico S.A. de C.V., Industria Vidriera No. 81, Industrial Zapopan Norte Zip Code. Zapopan, Jalisco, Mexico

EC Rep.: Sonoma Pharmaceuticals Netherlands B.V. | Boven de Wolfskuil 3C30 | 6049 Roermond | The Netherlands

## Dystrybutor:

KIKGEL Sp. z o.o., ul. Skłodowskiej 7, 97-225, Ujazd.