

# Microdacyn 60 Wound Care, elektrolizowany roztwór na rany, 500ml



Cena: 60,99 PLN

## Opis słownikowy

Producent / Marka	KIKGEL SP. Z O.O.
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny leczniczy

## Opis produktu

## Wyrób medyczny

### Microdacyn 60 Wound Care, elektrolizowany roztwór na rany, 500ml

#### Wskazania do stosowania:

- Microdacyn 60 Wound Care to elektrolizowany roztwór przeznaczony do stosowania w oczyszczaniu i nawilżaniu ran chirurgicznych (śródoperacyjnych i pooperacyjnych) oraz ran ostrych i przewlekłych, wrzodów, skaleczeń, otarć i oparzeń, w tym znajdujących się w dowolnej jamie ludzkiego ciała, np. ustnej, nosowej lub ucha.
- Podchloryn sodu i kwas podchloryny to substancje pomocnicze, które mogą wykazywać miejscowe działanie przeciwdrobnoustrojowe.
- Obniżając ilość drobnoustrojów i ułatwiając wytworzenie wilgotnego środowiska, roztwór ten umożliwia organizmowi przeprowadzanie procesów gojenia.
- Produkt Microdacyn50 Wound Care może być szeroko wykorzystywany w kompleksowym leczeniu ran i może być bezpiecznie stosowany na błony śluzowe.

## Składniki:

- Woda Elektryzowana, Chlorek Sodu, substancje pomocnicze: Podchloryn Sodu i Kwas Podchlorawy.

## Postępowanie z produktem:

- Microdacyn 60 Wound Care to produkt biozgodny w zakresie wskazanego zastosowania, który nie drażni ludzkiej skóry, oczu ani gardła, a do tego nie jest środkiem uczulającym skórę.
- Nie są wymagane żadne specjalne środki ostrożności dotyczące postępowania z produktem.

## Stabilność:

- Stabilność nieotwartego produktu jest zagwarantowana od daty produkcji do terminu ważności (termin ważności podano na etykiecie produktu).
- Po otwarciu stabilność gwarantuje się przez okres do 60 dni. Po otwarciu należy zapisać datę na butelce w miejscu „Date opened” (Data otwarcia).

## Wskazówki dla użytkownika:

- Produkt Microdacyn Wound Care jest gotowy do użycia bez potrzeby mieszania czy rozcieńczenia.
- Przed oczyszczeniem obszaru lub użyciem produktu należy odpowiednio umyć ręce.
- Produkt Microdacyn 60 Wound Care należy nakładać bezpośrednio na dotknięty obszar.
- Produkt Microdacyn 60 Wound Care należy stosować przy każdej zmianie opatrunku rany.
- Nasączenie opatrunku roztworem Microdacyn60" Wound Care ułatwi zdjęcie opatrunku.

## Stosowanie:

- Przed oczyszczeniem obszaru lub użyciem produktu należy odpowiednio umyć ręce.
- Nasączyć opatrunek roztworem Microdacyn 60 Wound Care podczas każdej zmiany opatrunku lub zgodnie z zapotrzebowaniem.
- Dozwolone jest zanurzanie na maksymalnie 15 minut dziennie, w czasie początkowego stosowania.

## Ostrzeżenia i uwagi:

- Jeśli zabezpieczenie chroniące przed otwarciem jest przerwane, nie należy używać produktu.
- Wyłącznie do użytku zewnętrznego.
- Produkt nie jest przeznaczony do wstrzykiwania ani spożywania.
- **Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na składniki produktu.**

- Nie należy używać produktu Microdacyny Wound Care w skojarzeniu z innymi roztworami stosowanymi miejscowo bez konsultacji z pracownikiem służby zdrowia.
- W przypadku głębokich lub poważnych ran bądź w przypadku innych wątpliwości dotyczących leczenia należy się skonsultować z pracownikiem służby zdrowia.
- W przypadku wystąpienia objawów zakażenia (nasilenie bólu, krwawienie, ropa) lub w sytuacji, gdy rana nie wykazuje oznak gojenia, należy się skonsultować z pracownikiem służby zdrowia.
- Wszelkie działania niepożądane należy zgłaszać pracownikowi służby zdrowia.
- W dodatku do stosowania produktu Microdacyngo Wound Care w niektórych wypadkach może być konieczne użycie antybiotyków działających ogólnoustrojowo i (lub) miejscowo.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- Nieużywany pojemnik powinien być zamknięty.
- Produkt Microdacyn Wound Care jest nieszkodliwy nawet w razie przypadkowego kontaktu z oczami lub nosem lub w przypadku spożycia.

## Przechowywanie:

- Microdacyn 60 Wound Care należy przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze pokojowej.
- Produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej i chronić przed zamarznięciem.
- Produkt jest niepalny.
- Po użyciu pojemnik należy ponownie zamknąć, przed przeniesieniem do miejsca przechowywania
- **Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla małych dzieci**

## Ważne:

- **To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.**
- Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE 1011
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę w języku polskim
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla małych dzieci.

Objętość netto: 500ml

## Producent

Oculus Technologies Of Mexico S.A. de C.V., Industria Vidriera No. 81, Industrial Zapopan Norte Zip Code. Zapopan, Jalisco, Mexico

EC Rep.: Sonoma Pharmaceuticals Netherlands B.V. | Boven de Wolfskuil 3C30 | 6049 Roermond | The Netherlands

## Dystrybutor:

KIKGEL Sp. z o.o., ul. Skłodowskiej 7, 97-225, Ujazd.