

Novama, Familino by Flaem, Inhalator pneumatyczno- tłokowy, 1 sztuka



Cena: 149,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	NOVAMED SP. Z O.O.
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny

Novama, Familino by Flaem, Inhalator pneumatyczno-tłokowy, 1 sztuka

Właściwości:

- Regulowana wielkość cząsteczek.
- Certyfikowany przez TÜV Rheinland.
- Innowacyjny system oszczędzania leku "Drug saver".
- Szerokie spektrum zastosowań.
- Pełne maski z miękkimi obwódkami i zaworami.
- Hipoalergiczne i bezpieczne materiały.
- Dezynfekowalne elementy zestawu.
- Zestaw akcesoriów dla całej rodziny.

- Elementy w widocznych kolorach.
- Bezawaryjność i niezawodność.
- Idealny dla użytkowników w każdym wieku.
- Hipoalergiczne i bezpieczne materiały

Miejsce działania:

- Oskrzela, oskrzeliki, tchawica (nebulizator w trybie większych cząsteczek bez założonej rurki przełącznika), pęcherzyki płucne (nebulizator w trybie mniejszych cząsteczek z włożoną rurką przełącznika).

Zastosowanie:

- Novama Familino może być używany do różnych schorzeń układu oddechowego, **takich jak zapalenie oskrzeli, krtani, płuc, przeziębienie, kaszel, katar, astma i zapalenie zatok.**

Wskazania do stosowania:

- Leczenie chorób układu oddechowego.
- Leki muszą być przepisane przez lekarza, który ocenił ogólny stan pacjenta.

Przeciwwskazania:

- Wyrób medyczny nie powinien być stosowany przez pacjentów, którzy nie są w stanie samodzielnie oddychać lub są nieprzytomni.
- Wyrobu nie należy używać w obwodach anestetycznych lub wentylacji wspomaganej.

Zestaw akcesoriów dla całej rodziny:

- Kompresor Familino.
- Zapasowy filtr Porex dokładnie oczyszczający powietrze trafiające do kompresora.
- Dopasowana końcówka do nosa.
- Wygodny ustnik.
- Przewód powietrzny.
- Duża maska dla dorosłych z miękką obwódką i zaworem antydyspersyjnym.
- Mała maska dla dzieci z miękką obwódką i zaworem antydyspersyjnym.
- Nebulizator RF8 Evo z 2 stopniową regulacją parametrów nebulizacji oraz nakładką oszczędzającą lek.

Przeznaczeni użytkownicy:

- Wyroby są przeznaczone do użytku przez prawnie upoważniony personel medyczny/pracowników służby zdrowia (lekarzy, pielęgniarki, terapeutów itp.).
- Wyrób może być używany bezpośrednio przez pacjenta.

Docelowa grupa pacjentów:

- Dorośli, dzieci w każdym wieku, niemowlęta.
- **Przed użyciem wyrobu, należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i, jeśli ma być używany u niemowląt, dzieci w dowolnym wieku lub osób o ograniczonych możliwościach (np. fizycznych, umysłowych lub sensorycznych), musi im towarzyszyć osoba dorosła odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo.**
- Do personelu medycznego należy ocena stanu i możliwości pacjenta, aby podczas przepisywania terapii określić, czy pacjent jest w stanie samodzielnie bezpiecznie obsługiwać aerozol, czy też terapia powinna być prowadzona przez osobę odpowiedzialną.
- W celu oceny zastosowania wyrobu u poszczególnych rodzajów pacjentów, takich jak kobiety w ciąży, kobiety karmiące, niemowlęta, osoby niezdolne do pracy lub osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych należy się zwrócić do personelu medycznego.

Miejsce użycia:

- Wyrób może być stosowany w placówkach służby zdrowia, takich jak szpitale, przychodnie itp. lub nawet w domu.

Ostrzeżenia:

- Wyrobu należy używać wyłącznie jako inhalatora terapeutycznego.
- Ten wyrób medyczny nie jest przeznaczony do ratowania życia. Każde inne użycie jest uważane za niewłaściwe i może być niebezpieczne. Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie. Zawsze należy skonsultować się z lekarzem ogólnym w celu identyfikacji leczenia.
- Należy przestrzegać zaleceń lekarza lub terapeuty rehabilitacji oddechowej dotyczących rodzaju leku, dawkowania i wskazań do leczenia.
- Jeśli podczas korzystania z wyrobu wystąpią reakcje alergiczne lub inne problemy, należy natychmiast zaprzestać jego stosowania i skonsultować się z lekarzem.
- Instrukcję należy przechowywać odpowiednio, aby móc z niej skorzystać w przyszłości. Jeśli opakowanie jest uszkodzone lub otwarte, należy skontaktować się z dystrybutorem lub centrum serwisowym.
- Nie należy narażać wyrobu na skrajne temperatury.
- Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, na słońcu lub w nadmiernie gorącym otoczeniu.
- Czas potrzebny na przejście z warunków przechowywania do warunków działania wynosi około 2godzin.
- Zabroniony jest jakikolwiek dostęp do otworu zespołu sprężarki. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez personel upoważniony przez producenta. Nieautoryzowane naprawy unieważniają gwarancję i mogą stanowić zagrożenie dla użytkownika.

Ważne:

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE 0051
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę w języku polskim
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym i nie widocznym dla małych dzieci
- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik wyrobu

Producent:

Flaem Nuova S.p.A. Via Colli Storici, 221/223/225 25015 S. martinio Della Battaglia, Włochy

Dystrybutor:

Novama Cloud S.A., ul. dr. Stefana Kopcińskiego 62D, 90-032 Łódź