

NOVAtest, Test ciążowy płytkowy, 1 sztuka



Cena: 5,90 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

Substancja
czynna -

Typ produktu Wyrób medyczny inny

Opis produktu

WYRÓB MEDYCZNY DO SAMOKONTROLI 0123

Novatest test ciążowy płytkowy - 1 sztuka

Test ciążowy płytkowy NOVAtest jest przeznaczony do szybkiego i wczesnego wykrywania ciąży i może być bez trudu wykonany samodzielnie w domowych warunkach. Test ciążowy może być wykonany już po 7 dniach od spodziewanego zapłodnienia.

- Dokładność 99,98 %
- Czulość 25 mIU/ml
- Wynik już po 3-5 minutach

Sposób użycia

Test ciążowy zaleca się wykonać w pierwszym dniu spodziewanej miesiączki.

Próbkę moczu należy zebrać do pojemnika dołączonego do zestawu. Zaleca się przeprowadzenie testu rano, ponieważ największe stężenie hormonu HCG jest w pierwszym porannym moczu.

1. Otwórz foliową torebkę i wyjmij płytkę testową.

2. Przy pomocy załączonej pipety nanieść około 4 krople moczu do dołka na płytce testowej.
3. Poczekać, aż pojawiają się barwne linie. W zależności od stężenia HCG w moczu pozytywny wynik może pojawić się już po 40 sekundach. Żeby potwierdzić negatywny wynik należy odczekać całkowity czas reakcji (5 minut). Nie odczytuj wyniku po czasie dłuższym niż 10 minut.

Interpretacja wyniku:

- **Wynik ujemny (brak ciąży)** - Wynik jest negatywny, gdy pojawia się pasek kontrolny C, natomiast brak paska testowego T. Taki wynik w 99,9% oznacza, że najprawdopodobniej nie jesteś w ciąży.
- **Wynik dodatni (ciąża)** - Wynik jest pozytywny w momencie pojawienia się dwóch wyraźnych pasków na płytce testowej, a więc zarówno w strefie testowej T, jak i w strefie kontrolnej C. Intensywność barwy paska T lub C nie ma najmniejszego znaczenia. Taki wariant wynikowy wskazuje z dużym prawdopodobieństwem, że jesteś w ciąży. Aby potwierdzić ten stan, udaj się do lekarza specjalisty.
- **Wynik nieważny** - Wynik możesz uznać za nieważny, jeżeli nie pojawi się żaden pasek lub wyświetli się jedynie prążek strefy testowej T. Wówczas najlepiej jest powtórzyć badanie, używając nowego testu ciążowego zgodnie z dołączoną do niego instrukcją obsługi.

Zawartość opakowania:

- 1 płytkę testową
- Pipetę
- Pojemnik na mocz
- Instrukcję w języku polskim.

Ważne:

- W celu poprawnego przeprowadzenia badania koniecznie należy się zapoznać z załączoną do opakowania instrukcją obsługi.
- Test służy wyłącznie do użytku zewnętrznego.
- Opakowanie z testem należy przechowywać w temperaturze 2-30°C. Nie zamrażać.
- Nie używać testu po dacie ważności umieszczonej na opakowaniu.
- Nie używać testu w przypadku, gdy opakowanie foliowe jest uszkodzone, ponieważ wilgoć z powietrza mogła uszkodzić test.
- Test jest przeznaczony tylko do jednokrotnego użycia.
- Zużyty test usunąć jak każdy inny odpad domowy.
- Test przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym

