

Novativ Vision Visolens Płyn do soczewek 360ml

Cena: 20,99 PLN



Opis słownikowy

Producent / Marka	STARPHARMA SP. Z O.O.
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny

Novativ vision, Visolens All in one, Wielofunkcyjny płyn do oczyszczania soczewek kontaktowych, 360 ml

Płyn do oczyszczania soczewek kontaktowych **Novativ Visolens All in One** został opracowany, aby zadbać o codzienną higienę i komfort noszenia soczewek kontaktowych, pomagając utrzymać ich właściwości.

Działanie:

Formuła płynu do oczyszczania soczewek kontaktowych **Novativ Visolens All in One** została opracowana, aby:

- czyścić soczewki i usuwać osady białka
- dezynfekować soczewki
- nawilżać soczewki dzięki podwójnej formule nawilżającej, która wykorzystuje ten sam naturalny środek nawilżający, który znajduje się we łzach.
- może być również używany razem z pojemnikiem na soczewki do przechowywania soczewek, gdy nie są używane.

- jest delikatny dla oczu i pozwala na bardziej komfortowe i naturalne noszenie soczewek
- jest odpowiedni do stosowania z twardymi i miękkimi soczewkami kontaktowymi, jak również z soczewkami silikonowo-hydrożelowymi.

Sposób użycia:

- idealny do stosowania jako część codziennej pielęgnacji soczewek.
- czyści, przepłukuje i dezynfekuje soczewki zgodnie z zaleceniami okulisty.
- przed użyciem należy sprawdzić, czy opakowanie nie jest uszkodzone.

Otwarcie butelki:

- należy przekręcić nakrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zerwać zabezpieczenie.
- przed dotknięciem soczewek kontaktowych, należy umyć i osuszyć ręce.

Czyszczenie soczewek:

- ułożyć soczewkę na dłoni, dodać 3-4 krople płynu do oczyszczania soczewek kontaktowych na każdą stronę powierzchni soczewki i delikatnie pocierać obie strony przez 20 sekund.
- dokładnie spłukać soczewkę dodatkową porcją płynu do oczyszczania soczewek
- włożyć soczewkę do odpowiedniej przegródki w pojemniku na soczewki
- powtórzyć powyższe czynności dla drugiej soczewki

Dezynfekcja soczewek:

- napełnić pojemnik na soczewki płynem do oczyszczania soczewek.
- zamknąć pojemnik i pozostawić w nim soczewki na co najmniej 6 godzin lub na noc
- po tym czasie soczewki są gotowe do użycia
- po każdym użyciu należy płyn wylać z pojemnika

Płukanie soczewek po oczyszczeniu i/lub dezynfekcji:

- należy wyczyścić, przepłukać i zdezynfekować soczewki zgodnie z zaleceniami okulisty

Składniki:

sterylny wodny, izotoniczny roztwór zawierający chlorek sodu i potasu, edetynian dwusodowy 0,0025%, poloksamer, poliheksanid 0,0002%, hialuroniansodu, hypromeloza, bufor sodowo-fosforanowy

Przechowywanie:

- przechowywać w oryginalnym opakowaniu
- przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła lub światła.
- nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone.
- nie przechowywać lub pozostawiać na słońcu lub w pobliżu źródła ciepła
- soczewki mogą być przechowywane w płynie do oczyszczania soczewek przez okres do kilku dni
- jeśli soczewki nie będą noszone przez więcej niż kilka dni, należy powtórzyć proces dezynfekcji
- przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci
- nie stosować po upływie terminu ważności
- użyć preparat w ciągu 90 dni od momentu otwarcia

Środki ostrożności:

- nigdy nie używać wody.
- wymieniać pojemnik na soczewki przynajmniej raz na 3 miesiące lub zgodnie z zaleceniami okulisty.
- nie stosować bezpośrednio do oka
- nie używać w przypadku alergii na jakikolwiek składnik preparatu
- jeśli dojdzie do podrażnienia oczu należy przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem okulistą
- aby uniknąć zanieczyszczenia, nie dotykać końcówki zakraplacza
- używać wyłącznie świeżego płynu. Zamknąć butelkę po każdym użyciu.
- nie używać wody z kranu, wody butelkowanej lub śliny do czyszczenia soczewek lub pojemnika na soczewki.
- nie stosować do soczewek jednodniowych, soczewki jednodniowe przeznaczone są do jednorazowego założenia a następnie wyrzucenia.

Ważne:

- **To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.**
- Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE 1282
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę w języku polskim
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.

Producent:

East Midlands Pharma Ltd

Dystrybutor:

Medicinae Sp. z o.o ul. Zbąszyńska 3 91-342 Łódź