

## Nozoil, aerozol do nosa, 10ml



Cena: 37,90 PLN

### Opis słownikowy

Producent / Marka	MYLAN SP. Z O.O.
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny leczniczy

### Opis produktu

## Wyrób medyczny

### Nozoil, aerozol do nosa, 10ml

#### Właściwości:

- Wyrób medyczny Nozoil pomaga w zapobieganiu nadmiernemu wysuszeniu błony śluzowej nosa i tworzeniu się strupów.
- Olej sezamowy w postaci aerozolu do nosa Nozoil działa nawilżająco i natłuszczająco na suchą błonę śluzową nosa, a także łagodzi jej podrażnienia.
- Nozoil to preparat, który zawiera wysoko rafinowany (całkowicie czysty) olej sezamowy.
- W każdej butelce znajduje się 10 ml tego oleju.
- Produkcja oleju sezamowego odbywa się poprzez delikatne tłoczenie dojrzałych nasion *Sesamum indicum* bez użycia wysokich temperatur.
- Jest to naturalny olej roślinny bogaty w witaminę E (w tym alfa, beta i gamma tokoferol).
- Witamina E ma właściwości przeciwutleniające.

- W związku z tym chroni błonę komórkową przed uszkodzeniem przez wolne rodniki takie jak ozon i dwutlenek azotu.

## Zastosowanie:

Nozoil stosuje się w celu nawilżenia, natłuszczenia i łagodzenia podrażnień suchych błon śluzowych jam nosowych. Preparat może być zastosowany, gdy występuje suchość błon śluzowych nosa i strupy spowodowane przez np.:

- otoczenie o niskiej wilgotności (np. klimatyzowane pomieszczenia/samochody, wysokie góry, upalną pogodę).
- przeziębienie lub grypę.
- długotrwałe stosowanie glikokortykosteroidów donosowych lub niektórych leków używanych w terapii trądziku.
- leczenie tlenem lub radioterapię.
- podeszły wiek.

Aerozolu do nos Nozoil® może również zostać zlecony przez lekarza w celu nawilżania błony śluzowej nosa w trakcie procesu gojenia po zabiegu chirurgicznym nosa.

## Sposób użycia:

Butelka Nozoilu jest wyposażona w pneumatyczny aplikator (pompkę).

Jedno naciśnięcie aplikatora (pompki) rozpyla 0,028 ml oleju sezamowego.

Jedna butelka oleju sezamowego (10 ml) zawiera około 350 dawek.

Każde naciśnięcie aplikatora rozpyla taką samą dawkę oleju sezamowego.

Butelka Nozoilu jest przezroczysta co umożliwi kontrolę objętości oleju pozostałą do wykorzystania.

- Nozoil powinien być podawany w dawce 1-3 rozpyleń do każdego otworu nosowego 3 razy dziennie.
- Nozoil powinien być podawany w pionowej pozycji ciała (siedzącej lub stojącej). Nie powinien być podany, co najmniej na jedną godzinę przed snem.
- Produkt może być stosowany tak długo jak to jest konieczne. Brak ograniczeń co do długości stosowania.

## Sposób użycia:

- Dokładnie wydmuchaj nos.
- Usuń plastikową zatyczkę z pompki buteleczki.
- Przed rozpoczęciem użytkowania lub po długiej przerwie w stosowaniu, zaleca się kilkukrotne naciśnięcie pompki, aż do momentu, wytryśnięcia oleju. Aby zapobiec zabrudzeniu, zaleca się rozpylenie oleju na chusteczkę
- Górną część aplikatora wprowadź do otworu nosowego. Trzymaj butelkę pionowo i rozpyl 1-3 razy. Rozpylaj w różnych kierunkach w nozdrzu, aby olej dotarł do wszystkich części jamy nosowej, jednocześnie wciągaj powietrze przez nos. Powtórz tę czynność dla drugiego nozdrza.
- Po użyciu oczyść aplikator i nałóż plastikową zatyczkę.

## Składniki:

- Olej sezamowy

## Przeciwwskazania:

- Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników.
- Nie stosować u dzieci poniżej 6 lat

## Ostrzeżenia:

- Nie zaleca się podawania Nozoilu tuż przed snem.
- Pacjenci po niektórych operacjach chirurgicznych głowy (np. zatok lub kanałków odprowadzających łzy do jam nosa) przed zastosowaniem Nozoilu powinni skonsultować się z lekarzem.
- W razie podejrzenia, że stosowanie Nozoilu spowodowało wystąpienie działania niepożądanego należy poinformować lekarza lub farmaceutę.

## Przechowywanie:

- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w zacienionym miejscu, poza bezpośrednim zasięgiem promieni słonecznych.
- Przechowywać w sposób niewidoczny i niedostępny dla małych dzieci.
- Nie stosować po upływie terminu ważności podanym na opakowaniu.
- Opakowanie należy zużyć w ciągu 6 miesięcy od otwarcia.

## Ważne:

- **To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.**
- Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę w języku polskim
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla małych dzieci.

Objętość netto: 10 ml

## Producent:

Pharmia Oy, Kalliotie 2, 04360 Tuusula Finlandia

## Dystrybutor:

Mylan EPD Sp z o.o., ul. Postępu 21 B, 02-676 Warszawa