

Olimp, ZatoClear Med Irygacja, Zestaw uzupełniający, 15 saszetek



Cena: 28,50 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Olimp
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny

Olimp ZatoClear Med Irygacja, zestaw uzupełniający - 15 saszetek

Opis produktu:

Olimp ZatoClear Med Irygacja to wyrób medyczny do płukania nosa i zatok. Zestaw uzupełniający zawiera 15 saszetek do przygotowywania roztworu, odpowiednich do korzystania z oryginalną butelką ZatoClear Med Irygacja (która nie wchodzi w skład zestawu uzupełniającego, można ją nabyć z zestawem startowym ZatoClear Med Irygacja). Roztwór delikatnie i dokładnie przemywa jamę nosową i zatoki. Dzięki dodatku ksylitolu, ma ponadto właściwości nawilżające błonę śluzową nosa. Płukanie roztworem ZatoClear Med pozwala wymyć z jamy nosowej zanieczyszczenia, alergeny i zalegającą wydzielinę

Składniki:

Ksylitol, chlorek sodu Ph.Eur.

Przeznaczenie produktu:

Preparat ZatoClear Med Irygacja stosuje się u dzieci po 4. roku życia i osób dorosłych w przypadku:

- ostrych i przewlekłych stanów zapalnych zatok przynosowych,
- alergicznego lub infekcyjnego nieżytu nosa,
- przed i po zabiegach chirurgicznych nosa i zatok,
- w okresie zwiększonej ekspozycji na pyły zawieszane w powietrzu (smog) lub miejscu pracy
- celu utrzymania prawidłowej higieny nosa i zatok przynosowych.

Sposób użycia:

Irygację należy wykonać za pomocą specjalnej butelki dołączonej do zestawu startowego ZatoClear Med Irygacja.

1. Przed pierwszym użyciem opłucz wszystkie elementy butelki ciepłą wodą. Umyj i osusz ręce.
2. Wsyp do butelki zawartość jednej saszetki ZatoClear Med. Irygacja i uzupełnij przegotowaną wodą (o temperaturze ciała) do poziomu zaznaczonej linii.
3. Dokładnie zakręć butelkę, zakryj palcem otwór w nakrętce i kilkakrotnie wstrząśnij butelką do całkowitego rozpuszczenia substancji.
4. Stań nad umywalką w lekko pochylonej pozycji. Przyłóż końcówkę butelki do jednego z otworów nosowych.

5. Płynnym ruchem ściśnij butelkę tak, by roztwór dostał się do jamy nosowej. Przez cały czas irygacji spokojnie oddychaj przez usta. Roztwór wypłynie drugim otworem nosowym.
6. Powtórz czynność dla pozostałej części roztworu, przykładając butelkę do drugiego otworu nosowego.
7. Po zakończeniu irygacji delikatnie wydmuchaj nos.
8. Pozostałą, niewykorzystaną część roztworu wylej. Wszystkie elementy butelki opłucz i osusz przed odłożeniem do przechowywania.

Płukanie należy przeprowadzić 1-2 razy dziennie lub wg zaleceń lekarza. Jedna saszетка ZatoClear Med. Irygacja w połączeniu z ok. 240 ml wody tworzy gotowy roztwór do płukania nosa i zatok.

Przeciwwskazania:

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników wyrobu.
- Wyrób nie powinien być stosowany przez osoby z całkowitą blokadą nosa, nieprawidłowo ustawioną przegrodą nosową lub niedrożnym przewodem słuchowym wewnętrznym.
- W przypadku infekcji ucha oraz po przebytej operacji ucha przed użyciem preparatu należy skonsultować się z lekarzem.
- Dzieci mogą stosować wyrób pod kontrolą osoby dorosłej.
- W przypadku zastosowania u dziecka poniżej 4. r.ż. przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem.

Uwagi:

- Może być bezpiecznie stosowany przez dłuższy czas, jednak w przypadku braku poprawy lub pogorszenia się objawów, pomimo stosowania produktu przez ponad 7 dni, należy skonsultować się z lekarzem.
- Nie stosować do iniekcji.
- Z butelki do irygacji nie powinna korzystać więcej niż jedna osoba, ponieważ może się to przyczyniać do rozprzestrzeniania infekcji.
- Ze względów higienicznych zaleca się wymianę butelki po 2-3 miesiącach używania.
- Irygacje można przeprowadzić najpóźniej godzinę przed snem lub przed wyjściem na zewnątrz (przy temperaturze poniżej 19 stopni celcjusza).
- Wyrób może być bezpiecznie stosowany przez kobiety w ciąży i karmiące piersią.
- Nie wpływa negatywnie na prowadzenie samochodów oraz obsługę maszyn i urządzeń mechanicznych.

Zawartość netto: 15 saszetek

Ważne:

- Wyrób medyczny.
- Posiada oznakowanie CE.
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim.

- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w języku polskim.