

## Omron C 101 Essential, nebulizator kompresorowy, 1 sztuka

Cena: 122,99 PLN



### Opis słownikowy

Producent / Marka	PRODUCENCKA CENTRALA FARMAC.PROCEFAR SP. Z O.O
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

### Opis produktu

## Wyrób medyczny

## Omron C 101 Essential, nebulizator kompresorowy, 1 sztuka

### Uwaga:

- Przed użyciem zapoznaj się dokładnie z treścią instrukcji obsługi dołączonej do opakowania

### Przeznaczenie:

- Produkt ten jest przeznaczony do podawania leków w nebulizacji w schorzeniach dróg oddechowych. Sprężarka jest przewidziana do obsługi wielu pacjentów naraz, natomiast nebulizator i akcesoria są przeznaczone tylko dla jednego pacjenta.

### Użytkownicy:

- Uprawnieni pracownicy służby zdrowia, czyli lekarze, pielęgniarki i terapeuci.
- Opiekunowie lub pacjenci pod nadzorem wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia w leczeniu domowym.
- Użytkownicy powinni być zdolni do zrozumienia ogólnych zasad obsługi urządzenia C101 Essential / X101 Easy i treści

niniejszej instrukcji obsługi.

#### Pacjenci:

- Osoby w każdym wieku ze schorzeniami dróg oddechowych, które wymagają podawania leków w postaci nebulizacji.

#### Ostrzeżenia:

- Urządzenia należy używać wyłącznie jako nebulizatora do celów terapeutycznych. Używanie urządzenia do wszelkich innych celów jest niewłaściwe i może być niebezpieczne. Producent nie odpowiada za skutki niewłaściwego korzystania z urządzenia.
- Nie wolno stosować urządzenia w obwodach oddechowych aparatów do znieczulenia ogólnego lub respiratorów.
- Po zakończeniu korzystania z urządzenia i przed rozpoczęciem jego czyszczenia należy zawsze odłączyć przewód zasilający od zasilania.
- W trakcie użycia nie należy zasłaniać szczelin wentylacyjnych. Może dojść do nagrzania się kompresora, co grozi oparzeniem po jego dotknięciu.
- Kompresor i przewód zasilający nie są wodoszczelne. Nie wolno rozlewać wody ani innych płynów na te elementy. Jeżeli dojdzie do rozlania się płynu na te elementy urządzenia, należy natychmiast odłączyć przewód zasilania od zasilania i wytrzeć płyn.
- Nie należy podejmować próby naprawy urządzenia.
- Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla pozbawionych nadzoru niemowląt i dzieci. Może ono zawierać niewielkie elementy, które mogą zostać połknięte.
- W przypadku stosowania urządzenia przez dzieci lub osoby niepełnosprawne, stosowania u dzieci lub osób niepełnosprawnych lub w ich pobliżu należy zapewnić ścisły nadzór.
- W kwestiach dotyczących rodzaju, dawki i schematu stosowania leku należy stosować się do zaleceń lekarza lub osoby zajmującej się leczeniem chorób układu oddechowego.
- Produkt ten nie powinien być stosowany u pacjentów nieprzytomnych ani u pacjentów bez spontanicznej czynności oddechowej.
- Po zakończeniu leczenia należy pamiętać o odłączeniu przewodu powietrza od nebulizatora i kompresora.
- Ze względu na swoją długość przewód zasilający i przewód powietrza mogą stanowić ryzyko uduszenia.
- Przy każdym użyciu należy upewnić się, że kompresor znajduje się w miejscu, w którym podczas zabiegu jest łatwy dostęp do wtyczki przewodu zasilającego.
- Jeśli podczas użytkowania urządzenia wystąpią reakcje alergiczne lub inne trudności, wówczas należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia i skonsultować się z lekarzem.
- W trakcie korzystania z urządzenia należy upewnić się, że w promieniu 30 cm od niego nie znajduje się telefon komórkowy ani żadne inne urządzenie elektryczne emitujące fale elektromagnetyczne. W przeciwnym razie może dojść do zakłóceń w pracy urządzenia.
- Nebulizator i akcesoria są przeznaczone do użytku przez jednego pacjenta. Nie stosować u wielu pacjentów; dla każdego pacjenta należy stosować oddzielne akcesoria.
- Części należy czyścić po każdym użyciu; w toku normalnego użytkowania należy je dezynfekować raz w tygodniu.
- W przypadku stosowania nebulizatora przez osoby niepełnosprawne, u dzieci lub osób niepełnosprawnych lub w ich pobliżu należy zapewnić ścisły nadzór

- Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla pozbawionych nadzoru niemowląt i dzieci. Może ono zawierać niewielkie elementy, które mogą zostać połknięte.
- W kwestiach dotyczących rodzaju, dawki i schematu stosowania leku należy stosować się do zaleceń lekarza lub osoby zajmującej się leczeniem chorób układu oddechowego.
- Produkt ten nie powinien być stosowany u pacjentów nieprzytomnych ani u pacjentów bez spontanicznej czynności oddechowej
- Po zakończeniu leczenia należy pamiętać o odłączeniu przewodu powietrza od nebulizatora i kompresora
- Ze względu na swoją długość przewód zasilający i przewód powietrza mogą stanowić ryzyko uduszenia
- Przy każdym użyciu należy upewnić się, że kompresor znajduje się w miejscu, w którym podczas zabiegu jest łatwy dostęp do wtyczki przewodu zasilającego.
- Jest podczas użytkowania urządzenia wystąpią reakcje alergiczne lub inne trudności, wówczas należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia i skonsultować się z lekarzem
- W trakcie korzystania z urządzenia należy upewnić się, że w promieniu 30 cm od niego nie znajduje się telefon komórkowy ani żadne inne urządzenie elektryczne emitujące fale elektromagnetyczne. W przeciwnym razie może dojść do zakłóceń w pracy urządzenia
- Nebulizator i akcesoria są przeznaczone do użytku przez jednego pacjenta. Niestosować u wielu pacjentów, dla każdego pacjenta należy stosować oddzielne akcesoria
- Części należy czyścić po każdym użyciu, w toku normalnego użytkowania należy je dezynfekować raz w tygodniu.

## Sposób użycia:

- Urządzenie należy stosować zgodnie z instrukcją dołączoną do opakowania wyrobu.

## Zawartość:

- Kompresor
- Zestaw nebulizatora
- Maski dla dzieci
- Maski dla dorosłych
- Ustnik
- Końcówka do nosa
- Przewód powietrza
- Łącznik
- Instrukcja obsługi

## Ważne:

- **To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.**
- Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE 0051
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę w języku polskim
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym i nie widocznym dla małych dzieci
- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik wyrobu

## Producent:

Omron Healthcare 53 Kunotsubo, Terado-choMuko, KYOTO 617-0002 Japan

## Dystrybutor:

PCF Pocefarm Sp. z o.o. ul. Żmigrodzka 242F 51-131 Wrocław