

# Omron, Ciśnieniomierz M6 Comfort Afib HEM-7380-E naramienny, automatyczny



Cena: 349,99 PLN

## Opis słownikowy

Producent / Marka	Omron
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

## Opis produktu

## Wyrób medyczny

### Omron M-6 Comfort Afib, ciśnieniomierz automatyczny, naramienny

Automatyczny ciśnieniomierz naramienny Omron M6 Comfort Afib (HEM-7380-E) to urządzenie przeznaczone do pomiaru tętna i ciśnienia krwi u osób dorosłych w warunkach domowych. Nowy intuicyjny design ułatwia korzystanie z ciśnieniomierza podczas codziennych pomiarów oraz monitorowania wyników.

Ciśnieniomierz Omron M6 Comfort wykrywa nieregularne bicie serca podczas pomiaru i emituje sygnał ostrzegawczy z odczytem. Może wykrywać nieregularne tętno, które może sugerować migotanie przedsionków (Afib). Urządzenie dokonuje 3 pomiarów w 30-sekundowych odstępach, a następnie wyświetla ich średnią wartość – funkcja uśredniania 3 ostatnich wyników zapewnia bardziej miarodajny wynik niż w przypadku pojedynczego pomiaru. Dodatkowo funkcja pomiaru w trybie porównawczym pozwala nie tylko porównać odczyty pomiarów porannych i wieczornych, lecz także porównać aktualny odczyt z poprzednimi pomiarami.

Urządzenie zostało wyposażone w unikalny mankiet Intelli Wrap Cuff, który, w przeciwieństwie do klasycznych mankietów, posiada strefę pomiaru obejmującą całe ramię (jej zakres został rozszerzony do 360°). Ulepszona technologia eliminuje problem ryzyka błędu pomiaru związanego z nieprawidłowym umieszczeniem mankietu na ramieniu i zapewnia dokładny pomiar ciśnienia krwi niezależnie od ułożenia mankietu. Technologia Intellisense zapewnia optymalne napełnienie mankietu, eliminując nieprzyjemny ucisk ramienia podczas pomiaru. Ciśnieniomierz posiada także wskaźnik prawidłowego założenia mankietu oraz czujnik ruchu ciała. Pamięć 100 pomiarów z datą i godziną dla 2 użytkowników + tryb gościa pozwalają korzystać z tego samego urządzenia kilku osobom.

## Opis produktu:

- duży wyświetlacz LCD,
- łatwy, automatyczny pomiar za pomocą jednego przycisku,
- innowacyjna technologia Intellisense gwarantująca komfortowy pomiar,
- sygnalizacja błędnie założonego mankietu,
- sygnalizacja ruchu ciała podczas pomiaru,
- funkcja daty i godziny,
- funkcja wykrywania nieregularnego bicia serca,
- funkcja uśredniania wyników 3 ostatnich pomiarów,
- funkcja pomiaru w trybie porównawczym,
- wskaźnik wysokiego ciśnienia,
- wykrywanie nieregularnego bicia serca,
- wskaźnik AFib wykrywający możliwość występowania migotania przedsionków,
- możliwość korzystania przez kilku użytkowników,
- pamięć 2 x 100 pomiarów,
- tryb gościa,
- walidacja kliniczna dla ogólnej populacji, kobiet w ciąży oraz diabetyków,
- uniwersalny mankiety na ramię 22-44 cm,
- nowy, intuicyjny design ułatwiający korzystanie z urządzenia,
- możliwość podłączenia do zasilania sieciowego (zasilacz nie jest dołączony do zestawu).

## Ciśnieniomierz M6 Comfort Afib – parametry

- **rodzaj ciśnieniomierza:** automatyczny,
- **metoda pomiaru:** oscylometryczna,
- **miejsce pomiaru:** ramię,
- **rozmiar mankietu:** uniwersalny (obwód: 22-42 cm),
- **pamięć:** 2 x 100 ostatnich pomiarów,
- **zasilanie:** 4 baterie alkaliczne AA 1,5 V,
- **waga:** 460 g (bez baterii),
- **wymiary:** 120 × 191 × 85 mm.

zakres pomiaru:

- ciśnienia: 0-299 mmHg,
- tętna: 40-180 uderzeń/minutę,

**dokładność pomiaru:**

- ciśnienia: +/- 3 mmHg,
- pulsu: +/- 5% odczytu,

**Zawartość opakowania:**

- ciśnieniomierz Omron M6 Comfort Afib (HEM-7380-E),
- mankiet Intelli Wrap Cuff (22-42 cm),
- zestaw 4 baterii AA,
- etui,
- instrukcja obsługi,
- karta gwarancyjna.

**Sposób użycia:**

- 5 minut przed pomiarem usiądź w wygodnej pozycji i odpręż się.
- Koniec mankietu z przewodem powinien znajdować się około 1-2 cm powyżej zgięcia łokcia.
- Upewnij się, że przewód powietrza znajduje się po wewnętrznej stronie ramienia i owiń starannie mankiet, aby się nie zsuwał.

Po naciśnięciu przycisku START/STOP następuje pomiar i automatyczny zapis.

**W celu uzyskania dokładnych wyników 30 minut przed pomiarem:**

- nie pij alkoholu,
- nie pal papierosów,
- nie bierz prysznic,
- nie pij kawy,
- nie spożywaj posiłków,
- nie uprawiaj sportu.

**Ostrzeżenia:**

- Nie należy rozmontowywać ani podejmować prób naprawy ciśnieniomierza ani jego części. Może to prowadzić do niedokładnych odczytów.

## Utylizacja:

- Należy oddzielić ten produkt od innych rodzajów odpadów i przetwarzać go w sposób odpowiedzialny, działając na rzecz ponownego wykorzystania zasobów materiałowych
- Tego produktu nie należy łączyć z innymi odpadami handlowymi w celu utylizacji.

## Ważne:

- **To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.**
- Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE 0197
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę w języku polskim
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.
- Urządzenie spełnia wymagania normy EN60601-1-2:2015 dotyczącej zgodności elektromagnetycznej (EMC).

## Producent:

Omron Healthcare 53 Kunotsubo, Terado-choMuko, KYOTO 617-0002 Japan.

## Dystrybutor:

PCF Pocefar Sp. z o.o. ul. Żmigrodzka 242F 51-131 Wrocław.

**Producent:** Omron Electronics Sp. z o.o.  
Adres: ul. Żwirki i Wigury 16A, Budynek 5B 02-092 Warszawa  
E-mail: info\_pl@omron.com