

Omron CompAIR C28P (NE-C105-E), nebulizator kompresorowy, 1 sztuka



Cena: 259,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	PRODUCENCKA CENTRALA FARMAC.PROCEFAR SP. Z O.O
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny

Omron CompAIR C28P (NE-C105-E), nebulizator kompresorowy, 1 sztuka

Uwaga:

- Przed użyciem zapoznaj się dokładnie z treścią instrukcji obsługi dołączonej do opakowania

Opis produktu:

- Wysoce skuteczny nebulizator do częstego stosowania
- Zaawansowana Technologia Zaworów (AVT) maksymalizuje ilość leku dostarczanego podczas wdechu i ogranicza stratę leku podczas wydechu poprzez optymalizację przepływu
- Skuteczna depozycja płucna leku w leczeniu zapalenia oskrzeli, zapalenia oskrzelików, POChP i astmy
- Wielkość cząsteczki: 25 µm

- Trwały i wytrzymały kompresor
- Przeznaczony do użytku domowego przez całą rodzinę i w placówkach medycznych

Zastosowanie medyczne:

- Produkt ten jest przeznaczony do podawania leków w nebulizacji w schorzeniach dróg oddechowych.

Użytkownicy:

- Dyplomowani pracownicy służby zdrowia, czyli lekarze, pielęgniarki i terapeuci.
- Opiekunowie lub pacjenci pod nadzorem wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia w leczeniu domowym.
- Użytkownicy powinni być zdolni do zrozumienia ogólnych zasad obsługi urządzenia C28P i treści załączonej instrukcji obsługi.

Pacjenci:

- Osoby w każdym wieku ze schorzeniami dróg oddechowych, które wymagają podawania leków w postaci nebulizacji.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa:

- Urządzenia należy używać wyłącznie jako nebulizatora do celów
- terapeutycznych. Użycie do innych celów jest niewłaściwe i i może
- stwarzać zagrożenie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za
- niewłaściwe użytkowanie.
- Nie wolno stosować urządzenia w obwodach oddechowych aparatów do znieczulenia ogólnego lub respiratorów.
- Po zakończeniu korzystania z urządzenia należy zawsze odłączyć przewód zasilający.
- Nie wolno zakrywać otworów wentylacyjnych podczas używania urządzenia. Kompresor może się nagrzać, stwarzając ryzyko poparzenia w razie jego dotknięcia.
- Kompresor i przewód zasilania nie są wodoszczelne. Nie wolno rozlewać wody ani innych płynów na te elementy. Jeżeli dojdzie do rozlania się płynu na te elementy urządzenia, należy natychmiast odłączyć przewód zasilania od zasilania i wytrzeć płyn.
- Nie należy podejmować próby naprawy urządzenia. Patrz część Rozwiązywanie problemów.
- Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla pozbawionych nadzoru niemowląt i dzieci. Może ono zawierać niewielkie elementy, które mogą zostać połknięte.
- W przypadku korzystania z urządzenia przez dzieci lub osoby niepełnosprawne, a także stosowania go u dzieci i osób niepełnosprawnych bądź w ich pobliżu, należy zapewnić ścisły nadzór. W kwestiach dotyczących rodzaju, dawki i schematu stosowania leku należy stosować się do zaleceń lekarza lub osoby zajmującej się leczeniem chorób układu oddechowego.
- Produkt ten nie powinien być stosowany u pacjentów nieprzytomnych ani bez spontanicznej czynności oddechowej. Po zakończeniu leczenia należy pamiętać o odłączeniu przewodu powietrza od nebulizatora i kompresora.
- Przewód zasilania i przewód powietrza mogą stanowić ryzyko uduszenia z powodu ich długości.

- Przy każdym użyciu należy upewnić się, że kompresor znajduje się w miejscu, w którym podczas leczenia jest łatwy dostęp do wtyczki przewodu zasilania. Jeśli podczas użytkowania urządzenia wystąpią reakcje alergiczne lub inne trudności, wówczas należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia i skonsultować się z lekarzem.
- W trakcie korzystania z urządzenia należy upewnić się, że w promieniu 30 cm od niego nie znajduje się telefon komórkowy ani żadne inne urządzenie elektryczne emitujące fale elektromagnetyczne. Może to skutkować pogorszeniem działania urządzenia.
- Do nebulizacji wykonywanych z użyciem nebulizatora kompresorowego nie należy stosować olejków, wywarów i nalewek ziołowych.

Zawartość:

- Kompresor
- Zasilacz sieciowy
- Zestaw nebulizatora
- Przewód powietrza
- Ustnik
- Adapter
- Maska dla dzieci
- Maska dla dorosłych
- Torba do przenoszenia
- 5 sztuk zapasowych filtrów powietrza
- Instrukcja obsługi

Ważne:

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE 0051
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę w języku polskim
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym i nie widocznym dla małych dzieci
- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik wyrobu

Producent:

Omron Healthcare 53 Kunotsubo, Terado-choMuko, KYOTO 617-0002 Japan

Dystrybutor:

PCF Pocefar Sp. z o.o. ul. Żmigrodzka 242F 51-131 Wrocław