

Omron Complete, Ciśnieniomierz automatyczny naramienny + EKG, 1 sztuka



Cena: 599,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	PRODUCENCKA CENTRALA FARMACEUTYCZNA PROCEFAR SP. Z O.O.
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny

Omron Complete, Ciśnieniomierz automatyczny naramienny + EKG, 1 sztuka

Uwaga:

- Przed użyciem zapoznaj się dokładnie z treścią instrukcji obsługi dołączonej do opakowania

Przeznaczenie:

- Urządzenie jest przeznaczone do pomiaru ciśnienia krwi, elektrokardiogramu (EKG) lub ciśnienia krwi i EKG jednocześnie.
- Urządzenie to jest ciśnieniomierzem elektronicznym przeznaczonym do pomiaru ciśnienia krwi i tętna u osób dorosłych.
- Urządzenie przeznaczone jest do rejestracji, przechowywania i przesyłania jednokanałowych sygnałów elektrokardiogramu (EKG). W połączeniu ze smartfonem urządzenie wyświetla zapis EKG oraz wykrywa obecność migotania przedsionków, bradykardii, tachykardii i prawidłowego rytmu zatokowego.
- Wyrób jest przeznaczony do użytku przez pracowników służby zdrowia, pacjentów z rozpoznanymi lub podejrzanymi chorobami serca oraz osób dbających o zdrowie w warunkach domowych.
- Urządzenie nie zostało przetestowane i nie jest przeznaczone do stosowania w pediatrii.

Odbiór i sprawdzenie:

- Ciśnieniomierz oraz inne elementy należy wyjąć z opakowania i sprawdzić pod kątem uszkodzeń.
- Jeżeli ciśnieniomierz lub którykolwiek z pozostałych elementów jest uszkodzony, NIE WOLNO GO UŻYWAĆ i należy skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej produktów firmy OMRON lub ich dystrybutorem.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa:

- Przed rozpoczęciem korzystania z ciśnieniomierza należy przeczytać rozdział „Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa” w niniejszej instrukcji obsługi.
- W celu zachowania bezpieczeństwa należy ściśle przestrzegać instrukcji obsługi należy SKONSULTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM.

Ostrzeżenie:

- NIE należy stosować tego urządzenia u niemowląt, małych dzieci lub osób pozbawionych możliwości wyrażania się.
- NIE należy zmieniać leczenia na podstawie wyników pomiarów i/lub zapisów EKG dokonywanych za pomocą tego ciśnieniomierza. Należy zażywać leki zgodnie ciśnienie krwi oraz inne choroby układu krążenia. z zaleceniami lekarza. TYLKO lekarz potrafi rozpoznawać i leczyć wysokie
- NIE należy używać urządzenia na ramieniu/palcach z obrażeniami lub poddawanych leczeniu
- NIE należy zakładać mankietu na ramię, do którego podłączony jest dożylny wlew kroplowy lub jest przetaczana krew. sprzęt chirurgiczny wykorzystujący prąd
- NIE należy używać ciśnieniomierza w miejscach, w których znajduje się częstotliwości, aparaty do obrazowania rezonansem magnetycznym o wysokiej lub skanery do tomografii komputerowej. Może to powodować nieprawidłowe działanie ciśnieniomierza oraz niedokładne odczyty ciśnienia krwi i/lub zapisy EKG.
- NIE należy używać tego ciśnieniomierza w środowisku bogatym w tlen lub w miejscach, w których występuje palny gaz.
- Przed użyciem tego urządzenia należy skonsultować się z lekarzem w następujących przypadkach: często występujące arytmie, takie jak przedwczesne pobudzenia przedsionkowe lub komorowe oraz migotanie przedsionków, miażdżycy tętnic słaba perfuzja, cukrzyca, ciąża, stan przedzrzucawkowy czy choroby nerek.
- NALEŻY PAMIĘTAĆ, że stany ciśnienia krwi i/lub zapis EKG. te w połączeniu z ruchem pacjenta, drżeniem lub dreszczami mogą wpłynąć na odczyt
- NIE należy samodzielnie stawiać diagnozy ani leczyć się na podstawie odczytów ciśnienia krwi i/lub zapisów EKG.
- KAŻDORÁZOWO należy skonsultować się z lekarzem.
- Aby uniknąć uduszenia, przewód powietrza należy trzymać z dala od niemowląt i dzieci.

Zawartość:

- Ciśnieniomierz
- Mankiet naramienny (HEM-RML31)
- Futerał

- 4 baterie alkaliczne A4
- Instrukcja obsługi
- Instrukcja konfiguracji
- Dzienniczek pomiarów ciśnienia

Ważne:

- **To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.**
- Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE 0197
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę w języku polskim
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.

Producent:

Omron Healthcare 53 Kunotsubo, Terado-choMuko, KYOTO 617-0002 Japan

Dystrybutor:

PCF Pocefar Sp. z o.o. ul. Żmigrodzka 242F 51-131 Wrocław