

Omron, Zasilacz sieciowy do ciśnieniomierzy i nebulizatorów, HHP-CM01-E, 1 sztuka

Cena: 47,80 PLN



Opis słownikowy

Producent / Marka	PRODUCENCKA CENTRALA FARMAC.PROCEFAR SP. Z O.O
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny

Omron, Zasilacz sieciowy do ciśnieniomierzy i nebulizatorów, HHP-CM01-E, 1 sztuka

Zastosowanie:

- Niniejsze urządzenie jest zasilaczem przeznaczonym do użytku z odpowiednimi urządzeniami firmy Omron.
- Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i podręcznik użytkownika odpowiedniego urządzenia firmy Omron
- Należy ją zachować do wglądu

Ważne Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Nie wolno używać zasilacza, jeżeli urządzenie lub kabel zasilający wyglądają na uszkodzone. Należy natychmiast wyłączyć zasilanie i wyjąć kabel z gniazdka. Zasilacz należy podłączyć do odpowiedniego gniazdka zasilania.
- Nie używać rozgałęziaczy elektrycznych
- W żadnym przypadku nie należy podłączać ani odłączać kabla zasilającego z gniazdka mokrymi rękami.

- Nie należy demontować ani podejmować próby naprawy zasilacza

Włożyć wtyczkę zasilania do gniazdka.

- Podczas odłączania od gniazdka należy bezpiecznie ciągnąć za wtyczkę zasilania
- Nie należy ciągnąć za kabel zasilający
- Przy korzystaniu z kabla zasilającego należy zwrócić uwagę na poniższe czynności i ich unikać:

- Nie uszkodzić.

- Nie modyfikować

- Nie skręcać.

- Nie spinać.

- Nie złamać.

- Nie zginać ani nie ciągnąć z użyciem nadmiernej siły. Nie zwijać

- Nie kłaść pod ciężkimi przedmiotami.

- Należy zetrzeć kurz z wtyczki zasilania.
- Nieużywany ciśnieniomierz należy odłączyć od gniazdka zasilania. Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć wtyczkę zasilania.
- Przewód zasilacza stwarza ryzyko uduszenia niemowląt.
- Niniejszego zasilacza można używać wyłącznie ze zgodnymi urządzeniami firmy Omron.
- Użycie nieobsługiwanych zasilaczy może spowodować uszkodzenie urządzenia.
- W trakcie korzystania z urządzenia należy upewnić się, że w promieniu 30 cm od niego nie znajduje się telefon komórkowy ani żadne inne urządzenie elektryczne emitujące fale elektromagnetyczne. W przeciwnym razie może dojść do zakłóceń w pracy urządzenia.

Używanie zasilacza

Uwaga: do podłączania i odłączania zasilacza należy wybrać łatwo dostępne gniazdo elektryczne.

1. Włożyć wtyczkę zasilacza do gniazdka zasilacza urządzenia.
2. Podłączyć zasilacz do sieci elektrycznej.

Aby odłączyć zasilacz, należy najpierw odłączyć go od sieci elektrycznej, a potem odłączyć zasilacz od urządzenia.

Konserwacja i przechowywanie:

- Aby zabezpieczyć urządzenie przed uszkodzeniem, należy stosować się do poniższych wskazówek.
- Urządzenie należy przechowywać w czystym, bezpiecznym miejscu

- Nie należy stosować ściernych ani lotnych środków czyszczących.
- Nie należy myć urządzenia, ani zanurzać go w wodzie.
- Do czyszczenia urządzenia nie używać benzyny, rozcieńczalników ani innych podobnych rozpuszczalników.
- Aby wyczyścić urządzenie, należy je odłączyć od gniazda i przecierać miękką suchą ściereczką.
- Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone przez producenta spowodują utratę gwarancji użytkownika
- Nie rozmontowywać ani nie podejmować prób naprawy urządzenia lub jego części

Uwaga:

Przed przystąpieniem do użytkowania przeczytaj instrukcję obsługi dołączona do opakowania

Utylizacja:

- Należy oddzielić ten produkt od innych rodzajów odpadów i przetwarzać go w sposób odpowiedzialny, działając na rzecz ponownego wykorzystania zasobów materiałowych
- Tego produktu nie należy łączyć z innymi odpadami handlowymi w celu utylizacji.

Ważne:

- **To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.**
- Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę w języku polskim
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.

Producent:

Omron Healthcare 53 Kunotsubo, Terado-choMuko, KYOTO 617-0002 Japan

Dystrybutor:

PCF Pocefarm Sp. z o.o. ul. Żmigrodzka 242F 51-131 Wrocław