

# One Touch Select Plus, paski do oznaczania stężenia glukozy we krwi, 50 sztuk



Cena: 38,34 PLN

## Opis słownikowy

Producent / Marka	LifeScan
Substancja czynna	Paski do oznaczania glukozy we krwi
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

## Opis produktu

## Wyrób medyczny do samokontroli

### OneTouch Select Plus, paski testowe do oznaczania stężenia glukozy we krwi, do glukometru, 50 sztuk

OneTouch Select Plus służą do oznaczania stężenia glukozy w świeżej krwi kapilarnej. Wynik podawany jest na podstawie pomiaru prądu elektrycznego, wytworzonego w reakcji glukozy z enzymem umieszczonym na elektrodzie testu paskowego. Próbkę krwi jest automatycznie zasysana przez okienko testu paskowego dzięki wykorzystaniu zjawiska kapilarnego. System skalibrowany jest do osocza krwi.

Produkt jest odpowiedni do użycia z:

- Glukometrami linii OneTouch Select Plus

## Zastosowanie:

- Do oznaczania stężenie glukozy we krwi.

## Sposób użycia:

**Nanoszenie krwi na pasek testowy:** przy pomocy nakłuwacza nakłuj bok opuszki palca. W celu lepszego uformowania się kropli krwi rozmasuj palec w kierunku jego opuszki lekko uciskając.

- Nie nakładać krwi na powierzchnię paska. Dotykanie paska testowego nie ma wpływu na wynik odczytu.

**Nieprzestrzeganie poniższych punktów może prowadzić do powstania błędnych pomiarów:**

- używaj wyłącznie testów paskowych, których data ważności jeszcze nie upłynęła;
- nie wyjmuj testu z pojemnika mokrymi rękami;
- dokładnie i szczerze zamykaj pojemnik zbiorczy testów;
- nie zginaj testu paskowego podczas wprowadzania go do glukometru;

## Ważne:

- To jest wyrób medyczny do jednorazowego użytku. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE 0344
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę w języku polskim
- Przed użyciem zapoznaj się z treścią instrukcji używania i etykietą bądź skonsultuj się z lekarzem, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.

## Przechowywanie:

- Przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Chronić od światła i wilgoci.
- Przechowywać w sposób niewidoczny i niedostępny dla dzieci.
- Nie używać ponownie.
- Po użyciu wyrzucić do kosza.

## Producent:

LifeScan Europe GmbH, Dammstrasse 19, 6300 Zug, Switzerland.