

Opatrunek Allevyn Adhesive 22,5cmx22,5cm 1 sztuka



Cena: 30,08 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	SMITH & NEPHEW SP. Z O.O
Substancja czynna	Emplastri polyurethanum spumatum
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny

Allevyn Classic Adhesive opatrunek - 1 sztuka

Rozmiar: 22,5 x 22,5 cm

Opis produktu:

- Allevyn Adhesive jest trójwarstwowym opatrunkiem piankowym zapewniającym wysoką paroprzepuszczalność i wspomaganie profilaktyki zakażenia rany

Produkt dostępny jest z refundacją z przepisu lekarza (przy określonych wskazaniach) lub bez recepty za pełną odpłatnością

Skład:

- wyrób składa się z poliuretanowej warstwy kontaktowej, pianki poliuretanowej oraz z foliowej warstwy zewnętrznej

Wskazania:

- opatrunek wskazany jest do stosowania na rany z umiarkowanym lub obfitym wysiękiem

Działanie:

- dzięki swym właściwościom chłonnym **Allewyn Adhesive** szybko absorbuje nadmiar wysięku, jednocześnie utrzymując wilgotne środowisko, które jest optymalne dla procesów gojenia się.
- nie przywiera do rany, dzięki czemu umożliwia łatwą i bezbolesną zmianę

Sposób użycia:

- ten opatrunek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą
- opatrunek można przyciąć do rany. Przed założeniem opatrunku należy oczyścić skórę wokół rany, usuwając nadmiar wilgoci
- opatrunek **Allewyn Adhesive** może pozostać na ranie do siedmiu dni
- opatrunek należy zmienić gdy są wskazania kliniczne, lub gdy na brzegach opatrunku widoczne będą przebarwienia.
- aby zmienić opatrunek, należy podnieść brzeg opatrunku i ostrożnie zdjąć opatrunek, aby uniknąć zdzierania skóry

Przeciwwskazania:

- nadwrażliwość na którykolwiek składnik opatrunku

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- produkt jednorazowy, nie stosować ponownie
- należy zachować ostrożność w trakcie stosowania ze środkami utleniającymi, takimi jak roztwory podchlorynów lub woda utleniona
- niewłaściwego stosowania lub zbyt częstego zmieniania opatrunku - może dojść do uszkodzenia delikatnej skóry
- lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta

Ważne:

- produkt jednorazowy, nie stosować ponownie
- posiada oznakowanie CE 2797
- posiada deklaracje zgodności UE
- zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- zawiera etykietę oraz oznaczenia w języku polskim

Przechowywanie:

- przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej, chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.
- produkt sterylny. Nie stosować, jeżeli opakowanie wewnętrzne zostało otwarte lub uszkodzone przed użyciem. Nie wyjąławiać ponownie
- wyłącznie do użytku zewnętrznego

Podmiot odpowiedzialny:

Smith Nephew Aleje Jerozolimskie 124 Warszawa

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.