

Opatrunek Allevyn Ag Adhesive 12,5x12,5cm 1 sztuka



Cena: 22,88 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	SMITH & NEPHEW SP. Z O.O
Substancja czynna	Emplastri antimicrobiotica
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny

Allevyn Classic Ag Adhesive opatrunek - 1 sztuka

Rozmiar: 12,5 x 12,5 cm

Opis produktu:

- wyrób medyczny **Allevyn Ag Adhesive** to samoprzylepny **opatrunek** z pianki poliuretanowej z dodatkiem **jonów srebra**.
- opatrunek przeznaczony jest do stosowania na rany zakażone o umiarkowanym, bądź silnym wysięku

Produkt dostępny jest z refundacją z przepisu lekarza (przy określonych wskazaniach) lub bez recepty za pełną odpłatnością

Skład:

- produkt składa się z perforowanej, przylepnej warstwy kontaktowej, wkład chłonny o strukturze hydrokomórkowej pianki poliuretanowej zawiera 1,33 mg/cm² sulfadiazyny srebra. Z zewnątrz opatrunek zabezpieczony został wodoszczelną, paroprzepuszczalną folią ochronną

Wskazania:

- produkt wskazany jest do stosowania na rany zainfekowane, o średnim lub dużym wysięku

Działanie:

- **Allewyn Ag Adhesive** wykazuje się dużymi zdolnościami absorpcyjnymi, dzięki czemu zapobiega maceracji zdrowej skóry.
- jednocześnie opatrunek zapewnia ranie optymalne, wilgotne środowisko, a zawartość jonów srebra umożliwia szerokie działanie przeciwbakteryjne, także wobec szczepów opornych na antybiotyki.
- wodoszczelna folia umożliwia pacjentowi stosowanie codziennej higieny bez ryzyka zamoczenia opatrunku

Sposób użycia:

- ten opatrunek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą
- opatrunek można przyciąć do rany. Przed założeniem opatrunku należy oczyścić skórę wokół rany, usuwając nadmiar wilgoci
- opatrunek Allewyn Adhesive może pozostać na ranie do siedmiu dni
- opatrunek należy zmienić gdy są wskazania kliniczne, lub gdy na brzegach opatrunku widoczne będą przebarwienia
- aby zmienić opatrunek, należy podnieść brzeg opatrunku i ostrożnie zdjąć opatrunek, aby uniknąć zdzierania skóry

Przeciwwskazania:

- nadwrażliwość na którykolwiek składnik opatrunku

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- produkt jednorazowy, nie stosować ponownie
- należy zachować ostrożność w trakcie stosowania ze środkami utleniającymi, takimi jak roztwory podchlorynów lub woda utleniona
- niewłaściwego stosowania lub zbyt częstego zmieniania opatrunku - może dojść do uszkodzenia delikatnej skóry
- lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta

Ważne:

- produkt jednorazowy, nie stosować ponownie
- posiada oznakowanie CE 2797
- posiada deklaracje zgodności UE
- zawiera instrukcję obsługi w języku polskim

- zawiera etykietę oraz oznaczenia w języku polskim

Przechowywanie:

- przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej, chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.
- produkt sterylny. Nie stosować, jeżeli opakowanie wewnętrzne zostało otwarte lub uszkodzone przed użyciem. Nie wyjąławiać ponownie
- wyłącznie do użytku zewnętrznego

Podmiot odpowiedzialny:

Smith Nephew Aleje Jerozolimskie 124 Warszawa

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.