

Opatrunek Allevyn Ag heel 10,5 cm x13,5 cm 1 sztuka



Cena: 28,15 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	SMITH & NEPHEW SP. Z O.O
Substancja czynna	Emplastru antimicrobiotica
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny

Allevyn Classic Ag Heel opatrunek - 1 sztuka

Rozmiar: 10,5 x 13,5 cm

Opis produktu:

- **Allevyn Ag Heel** opatrunek z pianki poliuretanowej z dodatkiem **jonów srebra** w kształcie kieszonki z cząsteczkami srebra, przeznaczony na zakażone rany umiejscowione w trudnych do założenia opatrunku okolicach, t.j: pięta, łokieć
- Sterylny

Produkt dostępny jest z refundacją z przepisu lekarza (przy określonych wskazaniach) lub bez recepty za pełną odpłatnością

Skład:

- sulfadiazyna srebra
- hydrokomórkowa wkładka pochłaniająca

- perforowana, nieprzywierająca warstwa kontaktowa
- zewnętrzna folia wodoodporna

Wskazania:

- produkt wskazany jest do stosowania na rany zainfekowane, o średnim lub dużym wysięku, umiejscowione w trudnych do opatrywania częściach ciała np. pięta, łokieć

Właściwości:

- trwałe i skuteczne działanie przeciwbakteryjne
- skuteczność wobec szerokiego spektrum patogenów
- wskazane na rany o umiarkowanym i obfitym wysiękiem
- dobrze chroniące podszycie, efekt 'wyściółki'
- może być przycinany w celu dopasowania do rany
- może być przymocowany przy użyciu folii OPSITE FLEXIGRID lub bandaża
- łatwy w zastosowaniu

Działanie:

- działa przeciwbakteryjnie
- wchłania nadmiar płynu wysiękowego, zachowując jednocześnie niezbędną ilość wilgoci w ranie
- zapobiega przenikaniu płynów i bakterii

Sposób użycia:

- ten opatrunek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą
- kształt opatrunku pozwala na zastosowanie go na piętę. Przed założeniem opatrunku należy oczyścić skórę wokół rany, usuwając nadmiar wilgoci
- opatrunek należy przymocować za pomocą opatrunku mocującego, przylepca lub bandaża
- opatrunek Allevyn Ag Heel może pozostać na ranie do siedmiu dni
- opatrunek należy zmienić, gdy są wskazania kliniczne lub gdy na brzegach opatrunku widoczne będą przebarwienia
- aby zmienić opatrunek, należy zdjąć opatrunek mocujący, przylepiec lub bandaż, a następnie unieść opatrunek z rany

Przeciwwskazania:

- nadwrażliwość na którykolwiek składnik opatrunku

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- stosowanie ze środkami utleniającymi, takimi jak roztwory podchlorynów lub woda utleniona
- stosowanie z miejscowymi środkami przeciwbakteryjnymi
- znaczna niewydolność wątroby lub nerek
- niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej
- stosowanie leków przeciwcukrzycowych i fenytoiny
- stosowanie podczas badania rezonansem magnetycznym
- unikać kontaktu z elektrodami lub żelami przewodzącymi podczas pomiarów elektronicznych, np. EKG, EEG
- niewłaściwe stosowanie lub zbyt częste zmienianie opatrunku może uszkodzić delikatną skórę

Ważne:

- produkt jednorazowy, nie stosować ponownie
- posiada oznakowanie CE 2797
- posiada deklarację zgodności UE
- zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- zawiera etykietę oraz oznaczenia w języku polskim

Przechowywanie:

- przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej, chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.
- produkt sterylny. Nie stosować, jeżeli opakowanie wewnętrzne zostało otwarte lub uszkodzone przed użyciem. Nie wyjąławiać ponownie
- wyłącznie do użytku zewnętrznego

Podmiot odpowiedzialny:

Smith Nephew Aleje Jerozolimskie 124 Warszawa

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.

