

Opatrunek, Allevyn Life, rany, owrzodzenia 10,3x10,3cm 1 sztuka



Cena: 13,51 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Smith & Nephew
Substancja czynna	Emplastri microfibricum cellulosae
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny

Allevyn Life opatrunek, 10,3 x 10,3cm, 1 sztuka

Rozmiar: 10,3 x 10,3cm

Opis produktu:

- Wyrób medyczny **Allevyn Life** to wysoce chłonny, samoprzylepny opatrunek piankowy z dodatkową warstwą maskującą wysięk. Przeznaczony jest do opatrywania różnego rodzaju ran sączących

Produkt dostępny jest z refundacją z przepisu lekarza (przy określonych wskazaniach), lub bez recepty za pełną odpłatnością

Właściwości:

- zapewnia ochronę przed wnikaniem drobnoustrojów
- utrzymuje wilgotne środowisko w ranie

- wchłania wysięk
- pochłania zapachy

Zastosowanie:

- **Allevyn Life** wykazuje się dużymi właściwościami chłonnymi - absorbuje wysięk, jednocześnie pochłania nieprzyjemny zapach.
- Warstwa maskująca sprawia, że wysięk nie jest widoczny na zewnątrz rany, co zwiększa poczucie czystości w trakcie użytkowania
- Silikonowa warstwa kontaktowa zapewnia bezbolesne zdejmowanie, natomiast wodoszczelna folia pokrywająca opatrunek z zewnątrz chroni go przed zamoczeniem i drobnoustrojami, jednocześnie umożliwiając swobodny przepływ powietrza
- odleżyny
- owrzodzenia podudzi
- cukrzycowe owrzodzenia stóp
- owrzodzenia nowotworowe
- rany po zabiegach chirurgicznych
- oparzenia pierwszego i drugiego stopnia
- miejsca pobrania skóry
- owrzodzenia grzybicze
- rozdarcia skóry

Sposób aplikacji:

Opatrunek specjalistyczny należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą

- Opatrunek **Allevyn Life** można pozostawić na ranie **maksymalnie przez 7 dni** (oprócz obszaru krzyżowego - tam maksymalnie 5 dni). W pierwszych etapach leczenia należy często kontrolować opatrunek. Zaleca się jego wymianę, jeśli wydzielina pokrywa **ponad 50% wskaźnika**. Decyzję o konieczności wymiany opatrunku należy podjąć na podstawie oceny klinicznej oraz zaleceń lekarza.

Zdejmowanie opatrunku

- podważyć krawędź opatrunku i powoli odklejać aż do całkowitego zdjęcia z rany

Produkt jednorazowego użytku, nie stosować ponownie

Przeciwwskazania:

- tego opatrunku nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości pacjenta na którykolwiek z jego składników

- lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania tego opatrunku u pacjenta

Środki ostrożności:

- opatrunku nie należy przecinać
- opatrunek jest jednorazowego użytku

Ciąża i karmienie piersią:

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem specjalistycznego opatrunku

Ważne:

- opatrunek należy przechowywać w temperaturze pokojowej, poniżej 25oC
- opatrunek należy przechowywać w suchym miejscu

Przechowywanie:

- przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej, chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.
- produkt sterylny. Nie stosować, jeżeli opakowanie wewnętrzne zostało otwarte lub uszkodzone przed użyciem. Nie wyjąławiać ponownie
- wyłącznie do użytku zewnętrznego

Ważne:

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Wyrób medyczny - **posiada certyfikat CE 2797**
- Posiada deklarację **zgodności UE**.
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w języku polskim.
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta